


ApoCure[®]

Advanced Hydrogel Technology

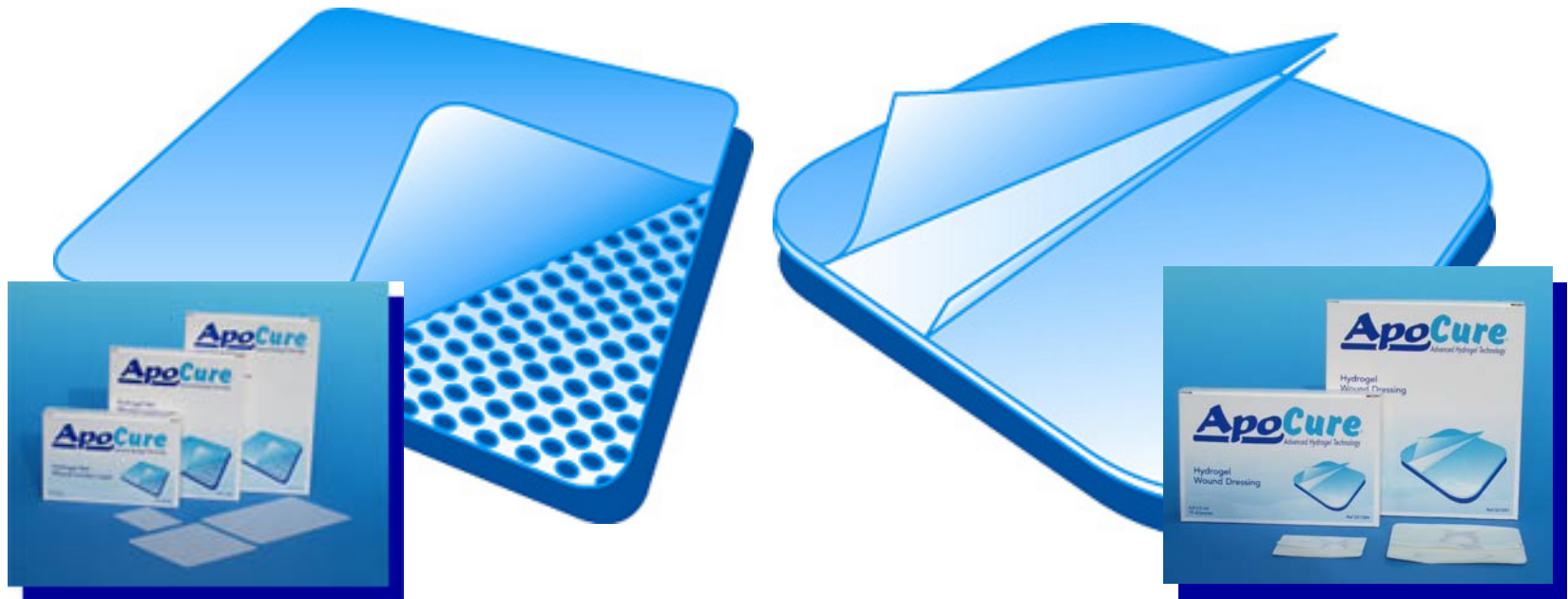

ApodanNordic

ApoCure[®]
Advanced Hydrogel Technology

Hydrogel Sår Bandage



ApoCure Advanced Hydrogel Technology

Hydrogel Sår Bandage



Produktbeskrivelse:

- Tynd Hydrogel sårbandage
- Indeholder 30% vand
- Indeholder 70% absorberende polymer
- Ingen konserveringsmidler pga af den lave vand %

Produktegenskaber:

- 1 gram Hydrogel absorberer 15 gram væske
- Den absorberede væske bindes i Hydrogelen
- Kan derfor anvendes under kompression
- Minimalt men sikkert hæftende sår bandage
- Hydrogel belægningen sikrer atraumatisk bandageskift

Indikationer:

Sår med minimalt til moderat sekretion

- Akutte sår
- Kroniske sår



ApoCure[®] Advanced Hydrogel Technology

Hydrogel Sår Bandage



Absorption

- 1 gram Hydrogel absorberer 15 gram væske
- Den absorberede væske bindes i Hydrogelen

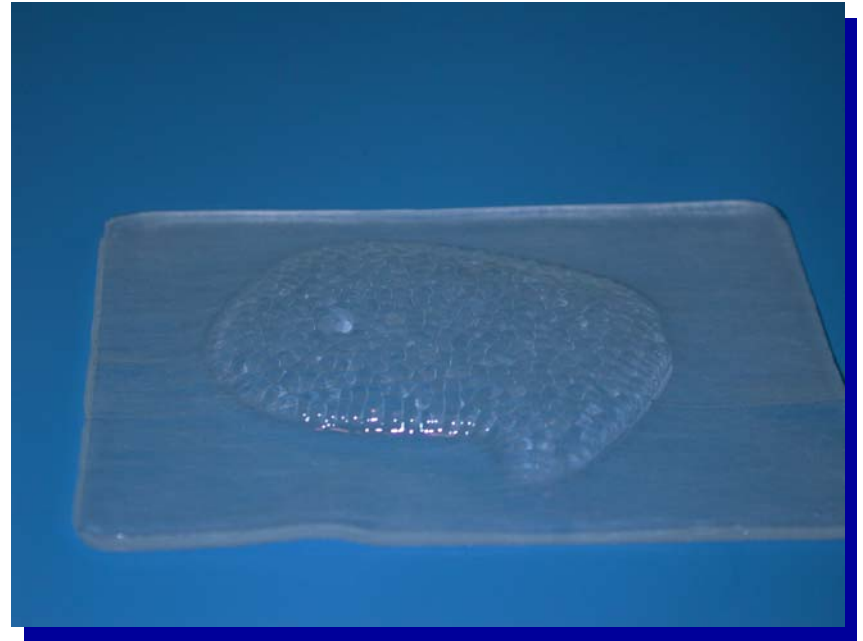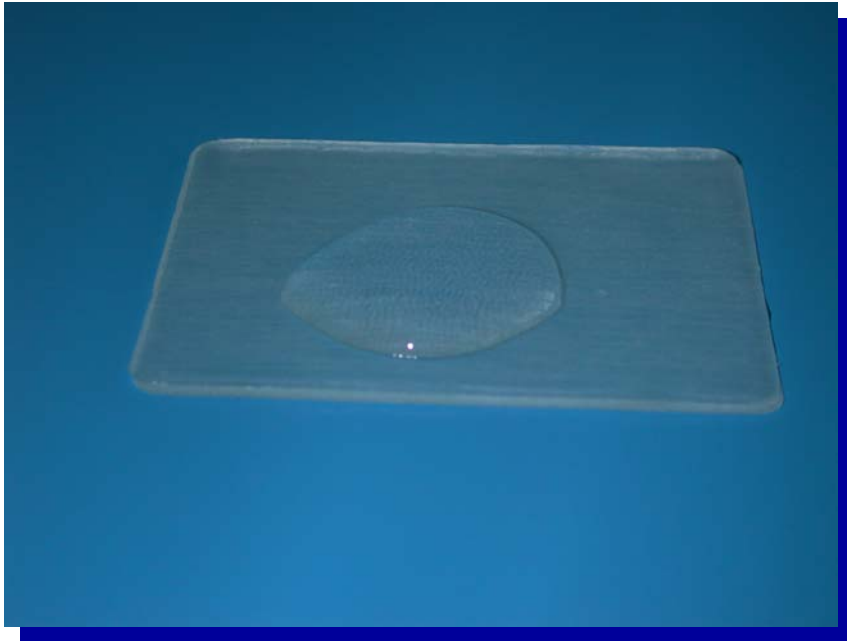


ApoCure[®] Advanced Hydrogel Technology

Hydrogel Sår Bandage




Absorption:

- Fordi den absorberede væske bindes i Hydrogelen kan den derfor anvendes under kompression

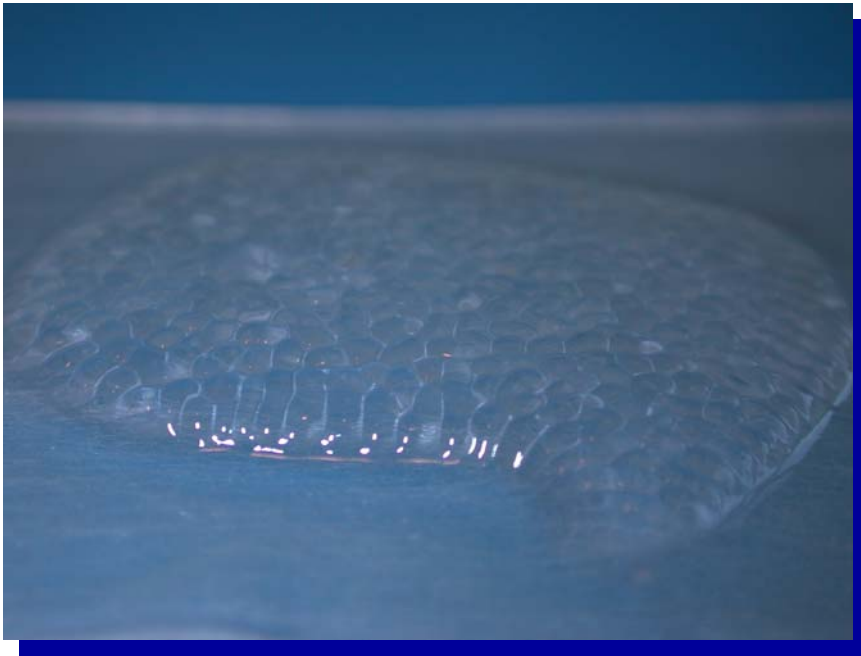


ApoCure[®] Advanced Hydrogel Technology

Hydrogel Sår Bandage

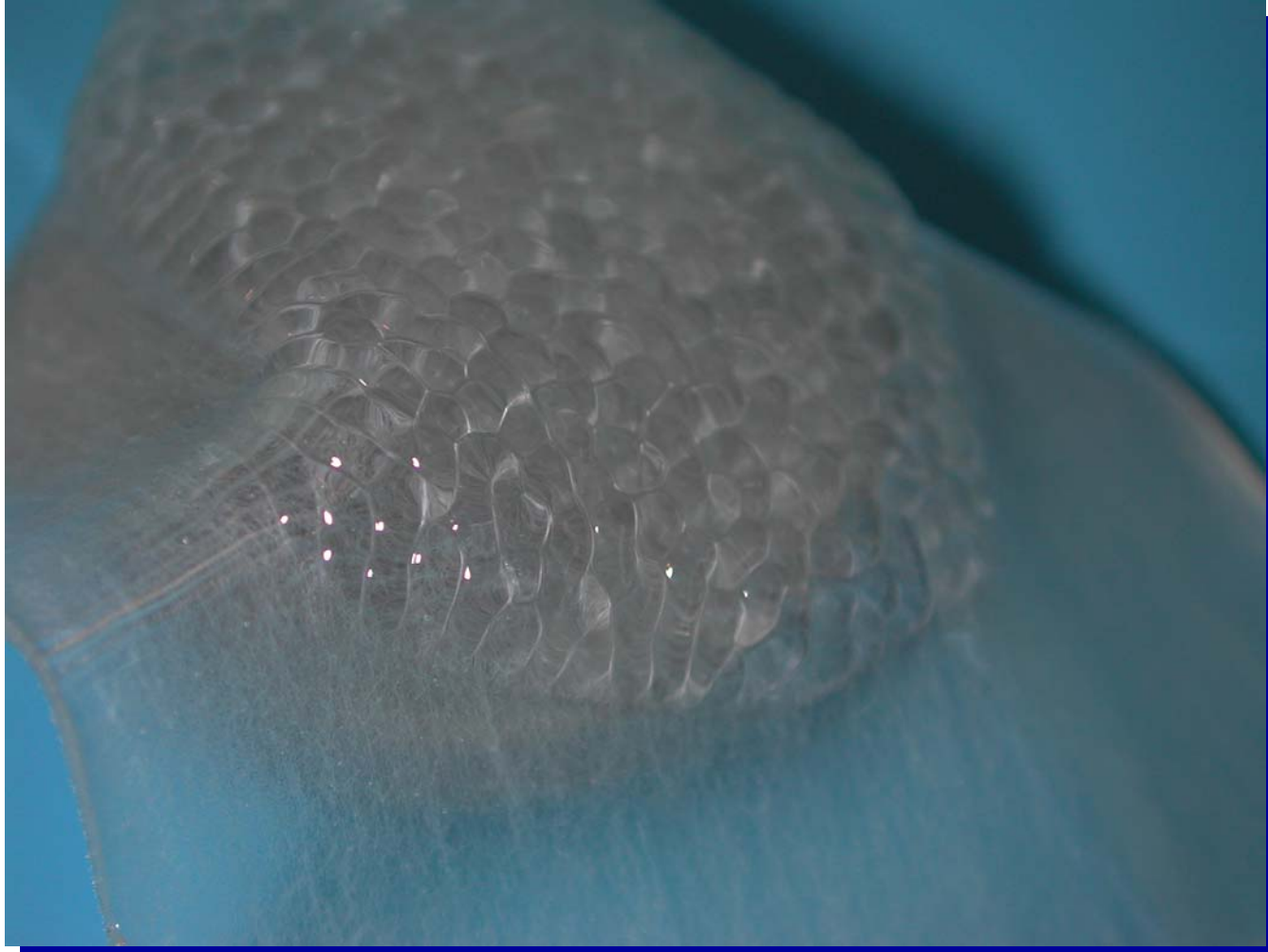

ApoCure[®] Advanced Hydrogel Technology

Hydrogel Sår Bandage

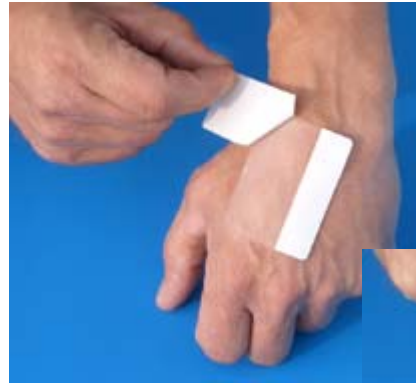

ApoCure Advanced Hydrogel Technology

Hydrogel Sår Bandage



Hydrogel Sår Bandage



Billede 1 – 19.02.03
Sårets størrelse – 3cm x 1.8cm
Sårets bund – 90% granulation, 10% centralt fibrin.




Billede 2 – 26.02.03
Sårets størrelse – 3cm x 1.8cm
Sårets bund – 100% granulations væv.



Billede 3 – 5.3.03
Sårets størrelse – 3cm x 1.7cm
Sårets bund – 100% granulations væv.



Billede 4 – 12.03.03
Sårets størrelse – 2cm x 1.4cm
Sårets bund – 90% granulations væv, 10% epithel væv.

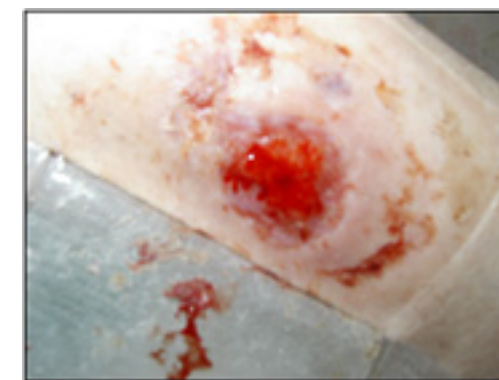

Billede 5 – 19.03.03
Sårets størrelse – 1cm x 1cm
Sårets bund – 90% granulations væv, 10% epithel væv.



Billede 6 – 26.03.03
Sårets størrelse – 0.8cm x 0.8cm
Sårets bund – 90% granulations væv, 10% epithel væv.

Hydrogel Sår Bandage



Størrelse

Bandager / æske

Æsker / karton

6,5 cm x 5 cm
10 cm x 10 cm

15 bandager
15 bandager

10 æsker
6 æsker

Hydrogel Net Sår Kontakt Lag



Hydrogel Net Sår Kontakt Lag



Produktbeskrivelse:

- Tynd Hydrogel belagt polyester Net
- Indeholder 30% vand
- Indeholder 70% absorberende polymer

- Ingen konserveringsmidler pga af lav vand%

Produktegenskaber:

- Minimalt hæftende sår kontakt lag
- Hydrogel belægningen sikrer atraumatisk bandageskift
- Hæfter kun på èn side

Indikationer:

Sår med rigeligt eksudat, men kræver sekundær bandage


- Akutte sår
- Kroniske sår

Hydrogel Net Sår Kontakt Lag




Hydrogel Net absorberer mindre mængder af eksudatet over såret, så der er ingen vedhæftning er til såret.

Hæfteevnen på den omgivende hud er minimal og kun på grund af hæfteevnen i Hydrogelen

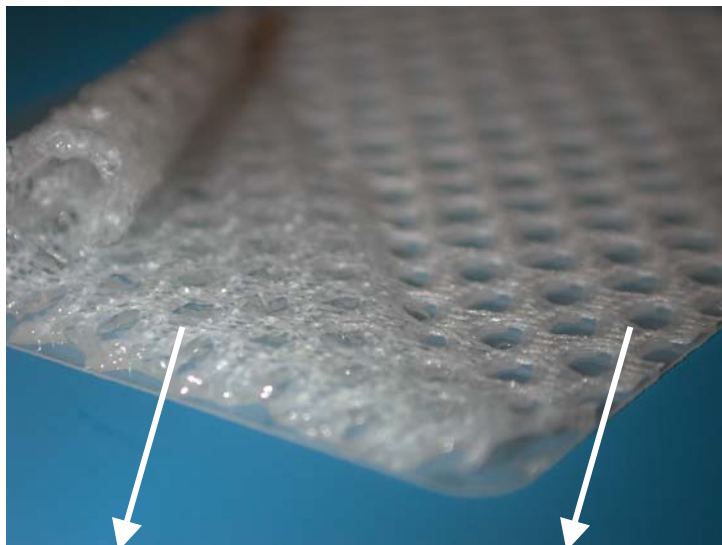

absorberet

ikke absorberet

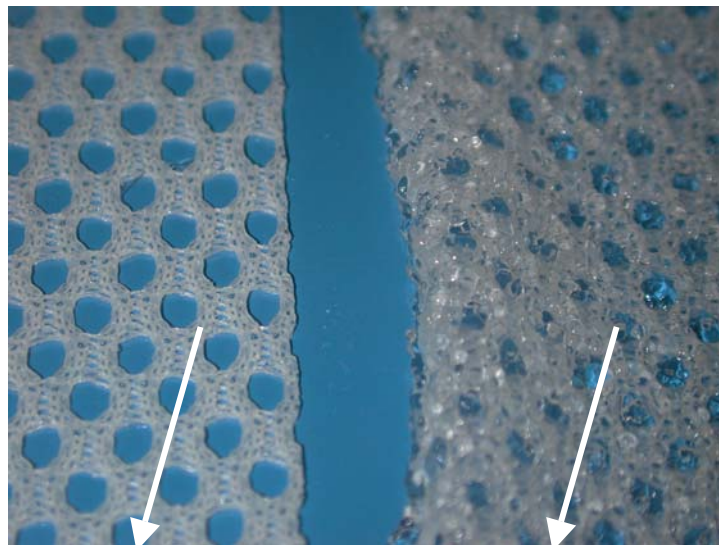

ikke absorberet

absorberet

Hydrogel Net Sår Kontakt Lag



ApoCure
Advanced Hydrogel Technology

Hydrogel Net Sår Kontakt Lag



Hydrogel Net Sår Kontakt Lag



Hydrogel Net Sår Kontakt Lag



Billede 1 – 07.04.03

*Sårets størrelse – 2.6cm x 2.2 cm
Sårets bund – 30% granulation, 70% skin flap.*



Billede 2 – 07.04.03

Skin flap trukket tilbage for at fjerne oprullede kanter.



Billede 3 – 07.04.03

Hud flap lagt tilbage, de oprullede kanter er fjernet. 90% huddække, 10% granulations væv tilstede.



Billede 4 – 07.04.03

Hydrogel Net sikrer skin hudflappens placering. Hydrogel Net dækkes med et filmprodukt..



Billede 5 – 14.04.03

*Sårets størrelse – 2.6cm x 2.2 cm
Sårets bund – 100% epithel*



Billede 6 - 22.04.03

*Sårets størrelse – Komplet ophølet
Sårets bund – 100% epithel*

Hydrogel Net Sår Kontakt Lag



Størrelse

Bandager / æske

Æsker / karton

- 6,5 cm x 5 cm
- 10 cm x 10 cm
- 10 cm x 15 cm

- 15 bandager
- 15 bandager
- 15 bandager

- 10 æsker
- 6 æsker
- 5 æsker

ApoCure Advanced Hydrogel Technology

Hydrogel Produkt linie



ApoCure Advanced Hydrogel Technology Hydrogel produkter – sikkert alternativ