



Læs mere om Skinnies terapeutisk beklædning, find størrelsesguide samt komplet produktoversigt på www.apodan.dk

Vær opmærksom på, at ikke alle størrelser og farver er på lager, hvorfor der skal påregnes en længere leveringstid.

I Danmark forhandles Skinnies kun hos Apodan.
Kontakt os for yderligere information.

 **Skinnies™**
Soft, seamless skinwear

Producent:
Skinwear Limited, Unit 6, 1 Mill View,
Hinckley, Leics, LE10 1XD

08/20

 **Apodan**

Lyngsø Alle 3 | DK-2970 Hørsholm
Tlf.: 32 97 15 25 | info@apodan.dk | www.apodan.dk

 **Apodan**

Brugervejledning Skinnies® WEB

TERAPEUTISK BEKLÆDNING TIL BABY, BARN OG VOKSEN



SØMLØS • ELASTISK • ÅNDBAR

 **Skinnies™**
Soft, seamless skinwear

Brugervejledning Skinnies WEB

Alle Skinnies produkter er:

- Strikket i ét stykke og helt uden generende sømme eller skarpe kanter.
- 360° elastisk og meget strækbar. Er behagelig at bære og følger kroppens bevægelser.
- Åndbar og temperaturregulerende. Varme og fugt ledes væk fra kroppen.
- Er diskrete i brug og kan bæres under almindeligt tøj.
- Fås i mange udgaver, størrelser og farver.
- Tåler maskinvask og tørretumbling og kan vaskes mindst 50 gange.

Skinnies WEB er specielt velegnet, hvor man ønsker en effektiv fiksering af sårbandager, og hvor den sarte hud ikke tåler klæbende materiale. Ex. ved Epidermolysis Bullosa, brandsår og stråleskader.

Da Skinnies WEB skal fikseres sårbandagerne, er det vigtigt, at tøjet sidder tæt til kroppen. Derved bliver sårbandagerne siddende på plads, og man får maximal udbytte af disse.

Skinnies WEB tåler cremer og salver.



Hvordan anvendes Skinnies WEB

1. Plej huden som anvist af sygeplejerske/læge.
2. Hvis der smøres med cremer/salver, bør disse have tid til at trænge ind før Skinnies tages på.
3. Rul Skinnies WEB op og før det henover den kropsdelt, hvor sårbandager skal fikseres, uden at røre ved huden.
4. Placér sårbandagerne og før forsigtigt Skinnies WEB nedover.
5. Skub Skinnies WEB på plads, så den sidder korrekt og behageligt.

Hvis du mistænker infektion, afbryd behandling og kontakt læge/sygeplejerske.

Materiale

Nylon 83%, elasthan 17%

Materialet sikrer, at tøjet sidder tæt til kroppen og beskytter huden mod friktion. Skinnies WEB leder fugt og varme væk fra kroppen.

Fås i hvid og sort til både børn og voksne.

Vaskeinstruktioner

Kan maskinvaskes ved 60° C.

Kan tørretumbles ved laveste temperatur.

Brug ikke skyllemiddel eller blegemiddel.

Kan ikke renses.

Kan ikke stryges.

Skal holdes væk fra åben ild.