



BIOSYNEX COVID-19 Ag BSS

VIROLOGY



Hurtigtest til kvalitativ påvisning af **COVID-19**



Simpel

Næsepodning



Hurtig

Resultat på 15 minutter



Komplet testkit med 25 test

Kan opbevares ved stuetemperatur eller i køleskab (2-30 °C)



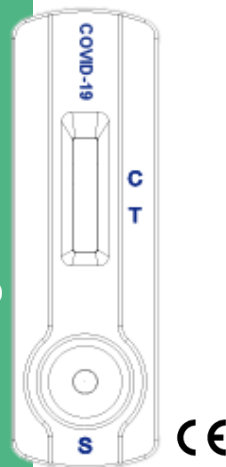


BIOSYNEX COVID-19 Ag BSS

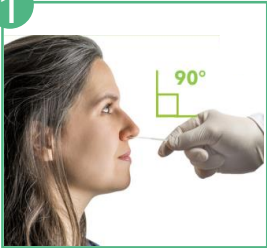
COVID-19 er en sygdom forårsaget af et nyt coronavirus (SARS-CoV-2).

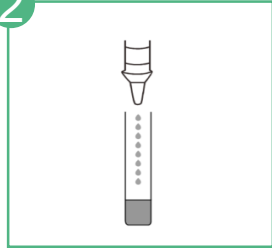
For at lette patienthåndtering og identificere inficerede individer, er det vigtigt at man hurtigt kan stille diagnosen COVID-19.

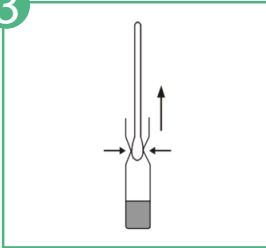
BIOSYNEX COVID-19 Ag BSS er en hurtig kromatografisk immunanalyse til kvalitativ påvisning af et COVID-19 antigen på kun 15 minutter ved hjælp af en næsepodning.

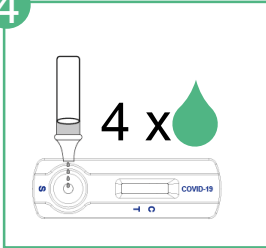


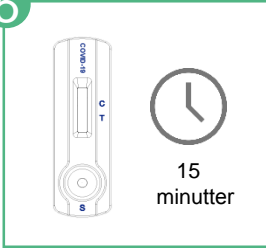
PROCEDUREN

- 

Foretag en næsepodning.
- 

Tilsæt 10 dråber (0,3ml) af buffer.
- 

Indfør podespinden i røret. Se proceduren jf. brugsanvisningen.
- 

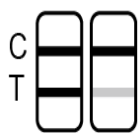
Montér hættten på røret. Anbring **4 dråber** af opløsningen i S.
- 

Læs resultatet efter **15 minutter**. Læs ikke efter 20 minutter.

Se videoen der illustrerer prøvetagningen:

<http://youtu.be/DVJNWefmHjE>

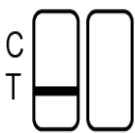
RESULTATER



POSITIV



NEGATIV



Ugyldig

YDEEVNE*

- Sensitivitet: >95%
- Specificitet: 100%

*Sammenlignet med PCR. Læs brugsanvisningen for flere oplysninger.

MATERIALER INKLUDERET

BIOSYNEX COVID-19 BSS
Ref. SW40006

Indeholder:

- 25 test
- 25 bufferhætteglas
- 25 vatpinde
- Brugsanvisning