

# ApoCure® Hydrogel Sårbandage



ApoCure Hydrogel sårbandage er designet til skabe et fugtigt sårmiljø, hvorved den autolytiske debridering fremmes, ligesom sår væske og bakterier optages og bindes i bandagen. Sår væsken absorberes vertikalt og indkapsles i hydrogel-kernen. Den transparente, åndbare film sikrer beskyttelse mod lækage samt kontamination udefra. Hydrogelkernen sørger for at såret holdes fugtigt og virker både lindrende og kølende.

Med ApoCure Hydrogel sårbandage får man en alt-i-én bandage, hvor det er muligt at inspicere såret uden at skulle fjerne bandagen.

## Hydrogel-kerne:

- Absorberer sårsekret
- Sikrer fugtigt sårmiljø
- Fremmer oprensning af såret
- Virker smertelindrende og kølende
- Sikrer atraumatisk fjernelse af bandagen

## Ideel til mindre sår med let til moderat sekretion:


- Behandling af små sår og hudafskrabninger
- Beskyttelse af vabler på fødder og hænder
- Over små incisions-steder, eks. efter kirurgi, skopier og fjernelse af dræn
- Behandling af mindre brandskader

## Tynd, åndbar, transparent film:

- Gør det muligt at inspicere såret, uden at fjerne forbindingen
- Sikrer ideelt fugtigt sårmiljø
- Vand- og bakterietæt
- Hudvenlig klæber hæfter blidt og sikkert

## Hvorledes appliceres ApoCure Hydrogel Sårbandage:

- Fjern beskyttelsespapiret på bagsiden
- Applicer bandagen, sørg for at den hæfter godt på huden
- Fjern beskyttelsespapiret på oversiden
- Kan forblive på såret i op til 7 dage afhængig af sårets tilstand og mængden af eksudat

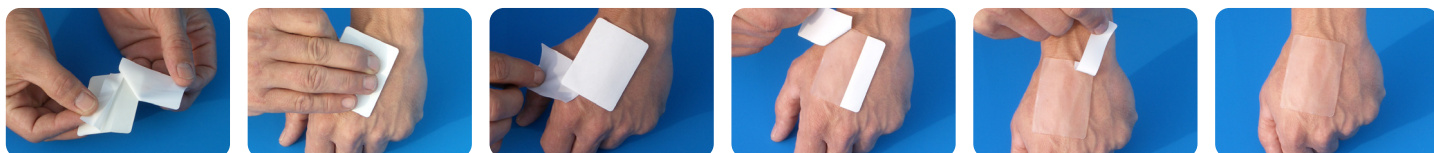

Vare nr.	Størrelse i cm	Antal pr. æske	Æsker pr. karton
021525	7,5 x 4,5 oval	50	8

Indeholder ikke konserveringsmidler.  
CE-mærket efter MDD 93/42-EEC klasse 2b.  
Enkeltpakket. Strålesteriliseret.

For yderligere information kontakt:  
Tlf.: 32 97 15 25 | [www.apodan.dk](http://www.apodan.dk) | [info@apodan.dk](mailto:info@apodan.dk)

 **Apodan**