



Hurtigtest til
kvalitativ påvisning
af **COVID-19**



Simpel

Næsepodning



Hurtig

Resultat på 15 minutter



Komplet testkit med 25 test

Kan opbevares ved stuetemperatur eller i køleskab (2-30 °C)



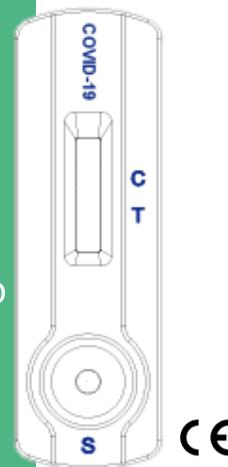


BIOSYNEX COVID-19 Ag BSS

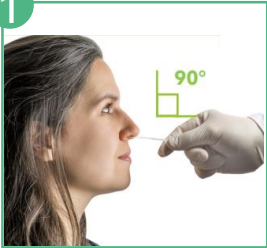
COVID-19 er en sygdom forårsaget af et nyt coronavirus (SARS-CoV-2).

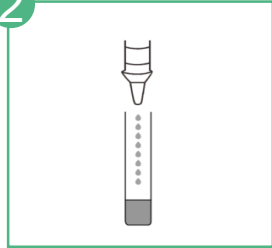
For at lette patienthåndtering og identificere inficerede individer, er det vigtigt at man hurtigt kan stille diagnosen COVID-19.

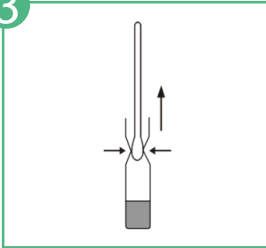
BIOSYNEX COVID-19 Ag BSS er en hurtig kromatografisk immunanalyse til kvalitativ påvisning af et COVID-19 antigen på kun 15 minutter ved hjælp af en næsepodning.

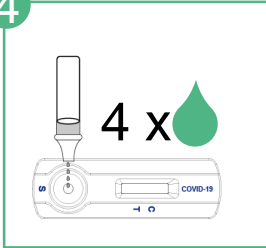


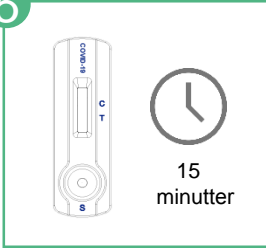
PROCEDUREN

- 

Foretag en næsepodning.
- 

Tilsæt 10 dråber (0,3ml) af buffer.
- 

Indfør podespinden i røret. Se proceduren jf. brugsanvisningen.
- 

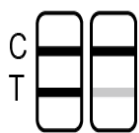
Montér hættten på røret. Anbring **4 dråber** af opløsningen i S.
- 

Læs resultatet efter **15 minutter**. Læs ikke efter 20 minutter.

Se videoen der illustrerer prøvetagningen:

https://www.youtube.com/watch?v=dkPJR3z9U84&feature=emb_title

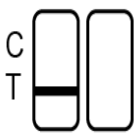
RESULTATER



POSITIV



NEGATIV



UGYLDIG

YDEEVNE*

- Sensitivitet: 97,3%
- Specificitet: 100%

*Sammenlignet med PCR. Læs brugsanvisningen for flere oplysninger.

MATERIALER INKLUDERET

BIOSYNEX COVID-19 BSS

Ref. SW40006

Indeholder:

- 25 Testkassetter
- 2 Buffer
- 25 Sterile podespinde
- 25 Ekstraktionsrør
- 1 Arbejdsstation
- 1 Indlægsseddel