

# Curea P1 Easy

## Superabsorberende bandage med silikonekant



**curea medical**

Innovation in Care



Et meget gennemtrængeligt non-woven sårkontaktlag mod såret sikrer skånsom debridering.

Patenteret SuperCore® uden klæbe- og bindemidler sikrer høj absorption og sikker binding af store mængder eksudat, bakterier og blod.

Blød hæftende silikonekant sikrer let applicering og forhindrer at forbindningen flytter sig inden fiksering.

En åndbar, væske- og bakterietæt BTBS-bagside sikrer optimalt fugtigt sår miljø og forebygger kontaminering.

### Curea P1 Easy - funktion & fordele:

- Blød silikonekant sikrer skånsom tilhæftning – sikrer let applicering.
- Patenteret SuperCore® kerne sikrer hensigtsmæssig absorptionskapacitet og sikker binding af store mængder eksudat – forlænger skifteinterval.
- Renser skånsomt såret for bakterier og debris.
- Dokumenteret binding af alle typer eksudat, herunder høj viscositet og blod – ét produkt til mange formål.
- Holder såret fugtigt – fremmer sårhelingen.
- Vertikal absorption og optimal væskefordeling – reduceret risiko for maceration af sår og hudomgivelser.
- Dokumenteret binding og reduktion af bakterier og lugt - reduceret risiko for infektion.
- Bevarer form under brug – høj bærekraft.
- Åndbar væske- og bakterietæt bagside beskytter mod lækage og kontaminering af omgivelser – reducerer unødige bandageskift.

## Curea P1 Easy - indikation & anvendelse:





- Akutte og kroniske sår med let til kraftig sekretion.
- Ideel under kompression.
- Appliceres direkte over såret, min. 2-3 cm ud over sårkanter.
- Kan kombineres med kavitetsbandager ved dybere sår.
- Fikseres med passende fiksering (tubular, cirkulær bandage etc.).
- Ved klæbende fiksering, da kun i kanten.
- Kan ligge på såret i op til 7 dage.

## Bemærk!

- Der må ikke klippes i bandagen.
- Må ikke anvendes til tørre sår eller ved sår med blottede muskler, sener og knogler.



## Applicering

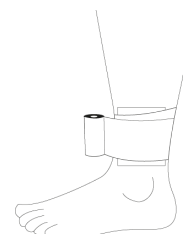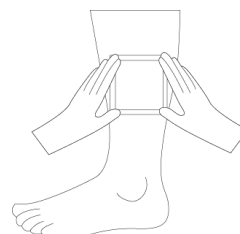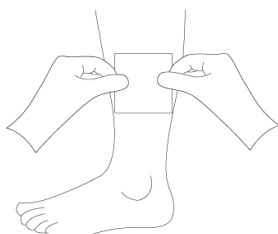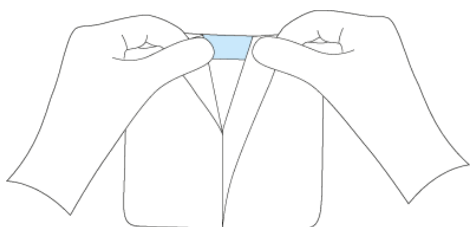

Varenr.	Beskrivelse	Størrelse	Størrelse på sugende midte	Antal pr. æske
P1E-110110-10	Curea P1 Easy	11 x 11 cm	9 x 9 cm	10
P1E-100200-10	Curea P1 Easy	10 x 20 cm	8 x 18 cm	10

Steril og enkeltpakket

Holdbar 5 år efter produktionsdato

For yderligere information kontakt:  
Tlf.: 32 97 15 25 | [www.apodan.dk](http://www.apodan.dk) | [info@apodan.dk](mailto:info@apodan.dk)