


Curea P1 Border®

Superabsorberende bandage med klæbekant

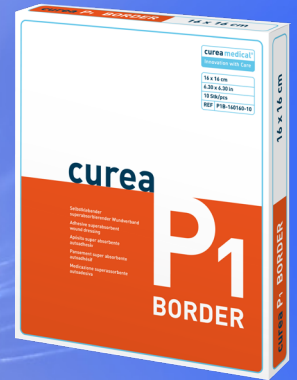

curea medical

Innovation in Care

SUPERCORE®
inside

Med selvklæbende kant til en enkel applicering og sikker fiksering.

Et meget gennemtrængeligt nonwoven sårkontaktlag mod såret sikrer skånsom debridering.

Patenteret SuperCore® uden klæbe- og bindemidler sikrer høj absorption og sikker binding af store mængder eksudat, bakterier og blod.

Curea P1 Border - funktion & fordele:

- Patenteret SuperCore® kerne sikrer hensigtsmæssig absorptionskapacitet og sikker binding af store mængder eksudat – forlænger skifteinterval.
- Renser skånsomt såret for bakterier og debris.
- Dokumenteret binding af alle typer eksudat, herunder høj viscositet og blod – ét produkt til mange formål.
- Holder såret fugtigt – fremmer sårhelingen.
- Vertikal absorption og optimal væskefordeling – reduceret risiko for maceration af sår og hudomgivelser.
- Dokumenteret binding og reduktion af bakterier og lugt - reducerer risiko for infektion.
- Bevarer form under brug – høj bærekraft.
- Blød semipermeabel PU bagside med acrylatklæber – enkel applicering, sikker fiksering, brusetæt.


Curea P1 Border - indikationer og anvendelse:

- Akutte og kroniske sår med let til kraftig sekretion.
- Ideel under kompression.
- Hvor der ønskes en brusætæt alt-i-én bandage.

- Appliceres direkte over såret, således at sårpudden går min. 2-3 cm ud over sårkanter.
- Kan kombineres med kavitationsbandager ved dybere sår.
- Kræver ikke yderligere fiksering.
- Kan ligge på såret i op til 7 dage.

Bemærk!

- Der må ikke klippes i bandagen.
- Må ikke anvendes til tørre sår eller ved sår med blottede muskler, sener og knogler.

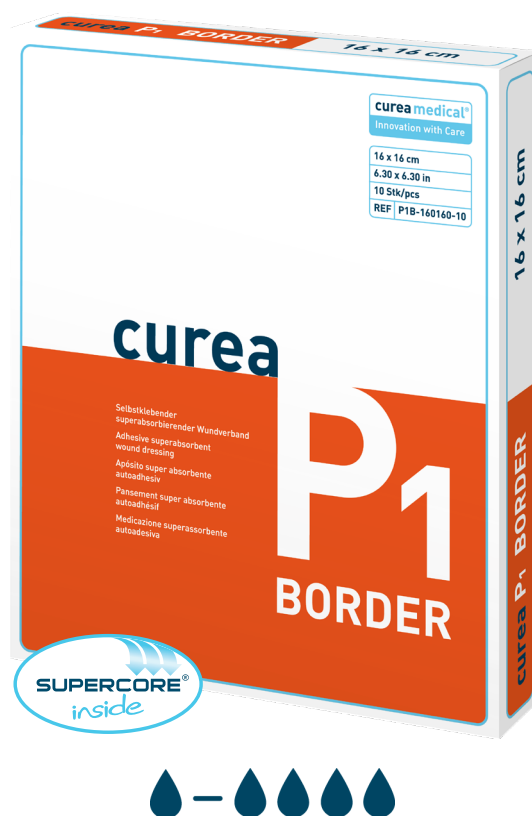

Varenr.	Beskrivelse	Størrelse	Størrelse på sugende midte	Antal pr. æske
P1B-120120-10	Curea P1 Border	12 x 12 cm	5,5 x 5,5 cm	10
P1B-160160-10	Curea P1 Border	16 x 16 cm	9 x 9 cm	10
P1B-150250-10	Curea P1 Border	15 x 25 cm	8 x 18 cm	10

Steril og enkeltpakket

Holdbar 5 år efter produktionsdato

For yderligere information kontakt:

Tlf.: 32 97 15 25 | www.apodan.dk | info@apodan.dk