

PolyMem®

Effektiv debridering - enkel sårbehandling

Kategori 4 tryksår

Case fra primærsektoren

Offentliggøres med tilladelse af Pia Ditlevsen, RN., Sårsygeplejerske, Odense kommune

Anamnese

92 årig kvinde. NIDDM. Immobil efter apopleksi i 2015.
PEG sonde, ernæres udelukkende pr. sonde.

Udvikler i foråret 2020 tryksår på hælen. I oktober 2020 opstår der yderligere trykskade med kavitetsdannelse og nekrose. Er gennem de første 10 måneder behandlet med gelfiber-bandage med sølv, sårkontaktag og superabsorberende bandage. Følges i Sårambulatoriet på Universitetshospital. Såret forventes at være kronisk pga. lavt AAI - er desuden amputationstruet.

Sårdiagnose

Kategori 4 tryksår på hæl med massiv nekrose og underminering, samt blottet knogle og sene.
Udfordringer med lugt og sekretion, samt risiko for infektion.

Sårstatus d. 13.1.2021

Før opstart med PolyMem foretages manuel debridering, hvor en del af nekrosen fjernes. Der opstartes behandling med PolyMem primo februar 2021.

Behandling fra d. 8.2.2021

- PolyMem WIC i kavitet
- Paraffingaze og superabsorberende sekundær bandage
- Bandageskift x 3 ugentligt



Før opstart med PolyMem

Sårstatus d. 24.2.2021

Renset op alene vha. PolyMem.
Blottet knogle og sene.
Flot granulationsvæv og fine sårkanter.
Huden omkring er velbehandlet.

Behandling

- PolyMem WIC i kavitet
- PolyMem MAX som sekundær bandage
- Bandageskift x 3 ugentligt



Efter 17 dages behandling med PolyMem WIC i kaviteten

Sårstatus d. 16.3.2021

Flot helingsprogression.

Kaviteten er nu dækket med granulationsvæv.

Udfordringer med blødning ved bandageskift.

Behandling

- PolyMem Standard
- Bandageskift x 2 ugentligt



Efter 5 ugers behandling med PolyMem

Sårstatus d. 23.3.2021

God helingsprogression med flot granulationsvæv.

Epitelisering fra sårkanterne.

Omkringliggende hud er velbehandlet.

Blødning ved skift er aftaget.

Knoglestykke nippet af ved kontrol i Sårambulatoriet d. 22.3.2021.


Behandling

- PolyMem Standard
- Bandageskift x 2 ugentligt



Efter 6 ugers behandling med PolyMem

Sårstatus ved behandling med PolyMem

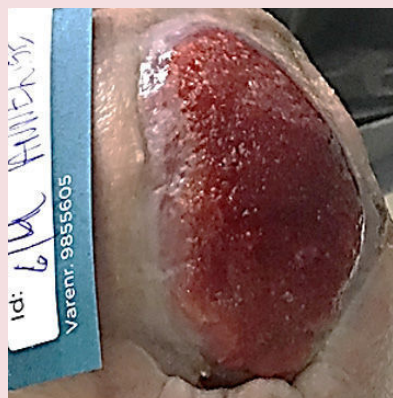

Efter 8 uger



Efter 12 uger



Efter 17 uger

Opsummering af sårbehandlingsforløb

Såret blev behandlet med avancerede sårbandager de første 10 måneder uden tegn på heling. Der er aflastet med hælløfter og puder gennem hele forløbet.

Siden opstart med PolyMem er der ikke foretaget manuel/skarp debridering.

Der er ikke anvendt sølvbandager.

En del af behandlingen er varetaget af plejepersonalet på plejecentret.

Såret heler efter i alt 22 ugers behandling.

For yderligere information kontakt:

Tlf.: 32 97 15 25 | www.apodan.dk | info@apodan.dk