

# PolyMem finger/tå bandage

ALT-I-ÉN BANDAGE TIL OPTIMAL BEHANDLING AF SÅR/SKADER

Hurtigere heling - Færre smerter

**PolyMem**<sup>®</sup>

PolyMem er en aktiv bandage, som fremmer heling, forebygger infektion og lindrer smerter. Bandagen renses såret, løsner og fjerner urenheder og bakterier, og reducerer hævelse i og omkring sår/skade.



## Unikke komponenter med unik effekt


**Renser:** Surfaktant er et mildt overfladeaktivt stof, som sikrer kontinuerlig skånsom rensning af området.

**Blødgør og beskytter:** Glycerin er hudplejende, medvirker til optimalt fugtigt sår miljø og sikrer, at bandagen ikke hæfter til sår/skade ved fjernelse.

**Absorberer:** Polyuretan matrix udvider sig og formes efter vævet. Sammen med indholdet af superabsorbant sikres høj væskehåndtering, binding af væske og bakterier i bandagen og minimering af lækage.

**Beskytter:** Den åndbare filmbagside beskytter mod forurening udefra og kan bruges som indikator for optimal tidspunkt for skift af bandagen.

**Lindrer smerter:** Den unikke konstruktion af bandagen sikrer, at aktiviteten i de nerveender, der registrerer smerter, ændres og smerteoplevelsen reduceres.

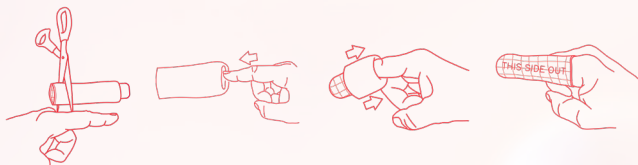

**Enkelt - Effektivt - Sikker i brug**

## Indikationer

- Akutte sår, hudafskrabninger, rifter, snitsår.
- Traumatiske sår, pulpaskader, forbrændinger.
- Kroniske/vanskeligt helende sår samt diabetiske fodsår.
- Skader uden sår, kontusioner, forstuvninger etc.
- Efter operation af fingre/tæer.

***PolyMem skal ALTID have kontakt til sår/sårbund. Anvend ikke andre produkter under PolyMem.***

## Anvendelse

For valg af rette størrelse anvendes Størrelsesguiden, alternativt måles omkredsen af finger/tå på det bredeste sted.

1. Mål bandage på finger/tå for rette længde. Klip evt. overskydende af i den åbne ende.
2. Rens såret efter gældende retningslinier.
3. Placér finger/tå ved åbningen, træk forsigtig slidsen ud, mens bandagen trækkes på.
4. Træk bandagen helt på plads.
5. Kanten fikseres med tape, film eller selvhæftende fikseringsbind.

Ved åbne sår anbefales det at skifte bandagen første gang efter max. 3 dage.

## Efterfølgende skift

1. Fjern bandagen, vurdér sår, sekretion og skifteinterval.
2. Soignér hudomgivelser og påsæt ny bandage.
3. Forstyr ikke sårbunden, undlad soignering/debridering.

Ved infektion følges lokale retningslinier.

## Skiftefrekvens

PolyMem må ligge på såret i max. 7 dage, dette afhænger af sekretion og sårets tilstand.

Skift bandagen straks, hvis den bliver våd.



Bandagen renses sår og reducerer hævelse, hvorfor det er normalt, at såret væsker mere de første dage. Derfor må der her forventes, at bandagen skiftes hyppigere for at forebygge maceration af hudomgivelser.

Som indikator for skift anbefales det at optegne sårets omkreds på bandagens yderside. Skift bandagen før sårsekret når sårkant.

## Tips & tricks

Ved moderat til kraftigt væskende sår anbefales at anvende PolyMem WIC under finger/tå bandagen. Vælg da en finger/tå bandage én størrelse større.



Ved skrøbelig/skadet hudomgivelser kan PolyMem med fordel dække hele området. Riv forsigtigt svejsningen op i den overskydende del af bandagen, træk PolyMem på, så den dækker håndryg/håndflade eller fodryg/fodballe, fiksér på kanter.

I starten af behandlingen kan der forekomme let lugt fra sår/bandage, dette skyldes oprensning og er helt normalt.

Hænger bandagen fast i størknet blod/ekssudat løsnes dette med vand/NaCl, hvorefter bandagen fjernes forsigtigt.

## Størrelsesguide

**SMALL**

Omkreds: 4,7 - 5,7 cm

**#1**

**MEDIUM**

Omkreds: 5,7 - 6,7 cm

**#2**

**LARGE**

Omkreds: 6,7 - 7,7 cm

**#3**

**X-LARGE**

Omkreds: 7,7 - 8,8 cm

**#4**

**XX-LARGE**

Omkreds: 8,8 - 9,8 cm

**#5**

Bandagen skal have tæt kontakt med hud/sår på finger/tå og samtidig være komfortabel at bære.



Vare nr.	Varebeskrivelse	Antal/æske
4401	PolyMem finger/tå #1, S	6 stk
4402	PolyMem finger/tå #2, M	6 stk
4403	PolyMem finger/tå #3, L	6 stk
4404	PolyMem finger/tå #4, XL	6 stk
4405	PolyMem finger/tå #5, XXL	6 stk

Anvendes efter anvisning af sundhedspersonale.  
 Sterile og enkeltpakkede. CE-mærket klasse 2b  
 Holdbar 5 år efter produktionsdato

Forhandles her:



webapoteket.dk

med24.dk

APOTEKEREN.DK

apopro  
 Danmarks online apotek

Derudover forhandles PolyMem finger/tå bandagen på flere af landets apoteker. Spørg på dit lokale apotek.



Tlf.: 32 97 15 25 | info@apodan.dk | www.apodan.dk