



# Spycra Sil-Tape

SKÅNSOM FIKSERING - TIL SART OG SKRØBELIG HUD



ATRAUMATISK • SIKKER FIKSERING • ENKEL I BRUG

**SPYCRA**<sup>®</sup>  
Sil-Tape

# Spycra Sil-Tape

## Blød fikseringstape med silikoneklæb

### Atraumatisk

Den bløde silikoneklæb sikrer effektiv og skånsom fiksering. Tapen kan fjernes atraumatisk og smertefrit. Særligt velegnet til skrøbelig hud og til børn.

### Høj bærekraft

Meget blød og ganske diskret. Former sig efter konturerne.

### Enkel i brug

Kan afrides uden brug af saks.

Kan foldes ud, hvis den krøller før applicering.

Kan re-positioneres ved behov for at flytte fikseringen eller ved evt. folder i tapen.

Efterlader ikke silikonerester på huden.



### Indikationer:

Anvendes på intakt hud til fiksering af medicinsk udstyr, fx slanger, dræn, katetre, iltmasker, sonder, elektroder.

### Anvendelse:

1. Riv den ønskede længde af rullen.
2. Placer tapen på ren og tør hud.
3. Tryk det blidt fast på huden for sikker fiksering.



Varenr.	Størrelse	Antal/æske	Antal/karton
SPY SIL-253000	2,5 cm x 3 m	1 rulle	12 æsker
SPY SIL-501500	5 cm x 1,5 m	1 rulle	12 æsker

Holdbar i 5 år efter produktionsdato.

Opbevares i beholder efter brug.

### Advarsel:

I varmt vejr eller ved svedtendens kan klæbeevnen nedsættes.

Anvend ikke Spycra Sil-Tape på åbne sår/ikke intakt hud.

Anvend ikke Spycra Sil-Tape til fiksering af arterie-katetre og kanyler, da den er usteril.

Anvend ikke Spycra Sil-tape, hvor der er kendt allergi overfor silikone gel.

Læs i øvrigt instruktionen i æsken før brug.



Producent:  
Reskin Medical N.V.  
+32 (0)13 35 36 24  
info@reskin.eu



Lyngsø Alle 3 | DK-2970 Hørsholm  
Tlf.: 32 97 15 25 | info@apodan.dk | www.apodan.dk

0322