


Quickguide til PolyMem

Et terapeutisk sårbehandlingsystem

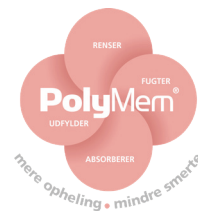

Hvad er PolyMem?

En **AKTIV** sårbandage bestående af:

- Polyuretan matrix
- Superabsorbant
- Surfaktant
- Glycerin
- Filmbagside (undtaget WIC kavitetsbandager)

Hvad gør PolyMem?

- Renser kontinuerligt
- Lindrer smerter
- Løser debris/fibrin/nekrose
- Absorberer og binder sårsekret, debris og bakterier
- Sikrer optimal fugtigt sår miljø
- Sikrer atraumatisk fjernelse af bandagen

Indikationer: Alle sårtyper i alle faser

- Kirurgiske sår
- Traumesår
- Brandsår
- Arterielle/venøse sår
- Diabetiske fodsår
- Tryksår
- Immunologiske sår
- Cancersår og stråleskadede hud

Kan anvendes under kompression.

PolyMem:

- modulerer inflammation
- understøtter og accelererer autolytisk debridement
- booster sårheling
- reducerer mikroødem i det område bandagen dækker
- reducerer infektion og infektionsrisiko
- reducerer lugtgener
- lindrer smerter vha. antinociceptorisk aktivitet

PolyMem **skal altid** have kontakt til sår bunden.
Anvend ikke andre produkter under PolyMem!

Rette produktvalg til rette sår og fase

Ikke-væskende sår	PolyMem Standard	Fugt sår eller bandage med vand/NaCl før applicering.
Tørre nekroser	PolyMem Standard	Fugt nekrose eller bandage med vand/NaCl før applicering, rids evt. i nekrosen.
Blottede sener og knogler	PolyMem Standard el. PolyMem Max afhængig af sekretion	Fugt evt. væv eller bandage med vand/NaCl før applicering afhængig af sekretion.
Let til moderat væskende sår	PolyMem Standard	
Moderat til kraftigt væskende sår	PolyMem Max	
Meget kraftigt væskende sår	PolyMem WIC + PolyMem Max	
Kaviteter > ½ cm, hvor sår bunden kan ses	PolyMem WIC	Kan lægges i flere lag. Fyld kun 2/3 af kaviteten.
Fistler og kaviteter > ½ cm, hvor sonderbar sår bund ikke kan ses	PolyMem WIC Silver Rope	
Sår, skader, kirurgiske incisioner på fingre/tær	PolyMem finger/tå bandage (str 1-5/S-XXL)	Kantfikseres m/film eller tape. Ved kraftigt væskende sår anbefales applicering af PolyMem WIC under bandagen. Vælg da en større størrelse finger/tå bandage.
Ved infektion eller risiko for infektion	PolyMem Silver ud fra ovenstående principper. Gælder også for finger/tå bandage.	OBS at underliggende årsag til infektion behandles.

Anvendelse af PolyMem

Første applicering

1. Vælg bandage ift. sårets tilstand.
2. Rens såret efter lokale hygiejniske principper.
3. Applicér PolyMem og fiksér med passende fiksering. Skift bandagen, før sårsekret når sårkanter.

PolyMem **skal altid** have kontakt til sårbunden. Anvend ikke andre produkter under PolyMem!

Tips & tricks

- PolyMem skal gå min. 1,5-5 cm ud over og intakt hud.
- Ved skrøbelig/skadet hud kan PolyMem med fordel dække hele området.
- Alle PolyMem uden klæb kan klippes til efter behov.
- Ternet filmside skal vende væk fra såret.
- Ved fiksering med klæb - fiksér KUN I KANTEN.

Værd at vide

- PolyMem aktiveres af fugt hvorved surfaktant og glycerin frigives kontinuerligt. Er aktiv i op til 7 dage.
- Hæfter bandagen til såret (pga. størknet blod/ekssudat), løsnes forsigtigt med vand/NaCl.
- PolyMem renser såret, hvilket i starten kan forårsage lugt/øget lugt, dette aftager.
- PolyMem løsner nekroser og fibrin, hvorfor såret initialt kan synes større og dybere, dette er normalt.

Vigtig viden!

PolyMem understøtter den autolytiske debridering, øger væsketilstrømningen og igangsætter kraftig aktivitet i sår og hud dækket af bandagen. Derfor kan der ses øget sekretion, og dermed behov for øget skiftfrekvens initialt - dette er helt normalt. Sekretion aftager gradvist efter 1-2 uger og sårhelingen accelereres.

For yderligere information læs venligst indlægssedlen i PolyMem-æskan.

Følgende bandageskift

1. Fjern bandagen og vurdér sårets behov, sekretion og skifteinterval.
2. Forstyr ikke sårbunden, undlad soignering/ debridering.
3. Ved infektion soigner såret efter lokale hygiejniske principper.
4. Soignér hudomgivelser.
5. Applicér PolyMem og fiksér med passende fiksering.

Gældende for PolyMem WIC

- PolyMem WIC anvendes i kaviteter med synlig, sonderbar sårbund.
- Kan lægges i flere lag ved dybe kaviteter.
- Kaviteter fyldes max. 2/3, undgå udtamponering.
- Kan anvendes som sårkontaktlag med passende sekundær PolyMem-bandage.

Gældende for PolyMem WIC Silver Rope

- Anvendes i kaviteter og fistler med ikke-synlig, sonderbar sårbund.

Skiftfrekvens

PolyMem kan ligge på såret i op til 7 dage - såfremt sekretion og sårets tilstand tillader det.

Som indikator for skift anbefales det at optegne sårets omkreds på bandagens yderside.

Bandagen skiftes, før eksudat når sårkanter eller er blevet våd, fx. ved bad.



For yderligere information kontakt:
Tlf.: 32 97 15 25 | www.apodan.dk | info@apodan.dk