

LymphaPress®

Comfy Armmanschett (halvjacka)




Lympha Press Comfy Armmanschett (halvjacka)

Comfy Armmanschetten rekommenderas till personer som har ett ödem i en arm och som på samma sida har lymfkärlsproblem på bålen. Trycket från Comfy Armmanschetten tillser att fri vätska mellan cellerna skoningsamt transporteras utan att belasta armhålan, varför manschetten passar utmärkt till personer som gjort en axillarutrymning, dvs. tagit bort lymfnoder i armhålan.

Användaren kommer att ha den motsatta armen fri, vilket underlättar användandet i hemmet. Manschetten har 12 överlappande luftkamrar. För korrekt passform justeras storleken med band.

Vid beställning av ComfyArm, höger eller vänster sida, beställs storleksstycket separat.

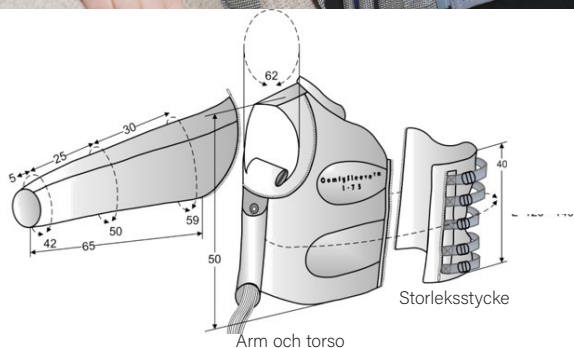

Varunr.	Höger sida	Maximal manschettdimension bröst höjd (cm)
022202	Comfy Armmanschett, höger arm och torso	-
022206	Storleksstycke till 022202 - Small	115
022204	Storleksstycke till 022202 - Medium	125
022207	Storleksstycke till 022202 - Large	140

Varunr.	Vänster sida	Maximal manschettdimension bröst höjd (cm)
022203	Comfy Armmanschett, vänster arm och torso	-
022205	Storleksstycke till 022203 - Small	115
022209	Storleksstycke till 022203 - Medium	125
022208	Storleksstycke till 022203 - Large	140

För mer information kontakta:
Tlf.: +45 32 97 15 25 | www.lymphapress.se | info@apodan.dk

Mätpunkter på kroppen inför val och storlek av manschett

Mätpunkter på kroppen - Mät med måttband, men dra inte åt så att huden trycks in!

Till överkroppsmanschetter	Armmanschett	Comfy arm	Jackmanschett
Omkrets underarm, bredaste stället	x	x	x
Omkrets armbåge, med sträckt arm	x	x	x
Omkrets överarm, bredaste stället	x	x	x
Omkrets bål i brösthöjd		x	x
Omkrets midja (mellan revben och höftben)		x	x
Armlängd, sträckt arm (från långfingerspets till armhåla)	x	x	x
Ange höger eller vänster sida		x	



Armmanschett



Comfy Armmanschett



Jackmanschett

Till underkroppsmanschetter	Benmanschetter, alla	Byxmanschetter och LymphaPod
Omkrets ankel	x	x
Omkrets vad, bredaste stället	x	x
Omkrets knä, med sträckt ben	x	x
Omkrets lår, bredaste stället	x	x
Omkrets höft, bredaste stället		x
Omkrets midja		x
Benlängd medialt (mät på insidan av benet från golv till gren)	x	x



Benmanschett med karborrband och fyra luftkammare i foten



Comfy Benmanschett med blixtlås och en luftkammare i foten



Byxmanschett Standard eller XL



LymphaPod Byxmanschett

Val av manschettstorlek

När pumpen fyller manschetten med luft, kommer luftintaget att anpassa kompressionen efter kroppskonturen. Välj därför en större manschettstorlek än kroppsmåtten.

Tänk på att när luften fylls i benmanschettens luftkammare under foten, så kommer manschetten att dras något nedåt (i perifer riktning). Därför rekommenderar vi att man väljer en benmanschett som är cirka 10 cm längre än personens benlängd.