

# Spycra Film & Spycra Roll

SKÅNSOM FIKSERING - TIL SART OG SKRØBELIG HUD

## Spycra Roll

Usteril tynd transparent film med silikoneklæb på rulle

### Atraumatisk

Den bløde silikoneklæber sikrer god tilhæftning og skånsom fiksering. Kan fjernes atraumatisk og smertefrit, og er især velegnet til skrøbelig og udsat hud.

### Høj bærekraft

Meget blød og fleksibel - former sig efter konturerne og følger kroppens bevægelser. Åndbar, væske- og bakterietæt film - minimerer risiko for maceration af huden og beskytter mod forurening.

### Enkel i brug

Enkel at applicere med meget få greb. Kan foldes ud, hvis den krøller før applicering. Kan re-appliceres ved evt. folder i filmen efter applicering. Kan klippes i passende længde. Efterlader ikke silikonerester på huden.

### Indikationer:

Anvendes på intakt hud, da filmen er usteril

- Fiksering af primær sårbandage
- Fiksering af slanger, dræn og katetre
- Landingzone under kraftigt klæbende produkter
- Beskyttelse af skrøbelig og udsat hud, ex. mod friktion

### Anvendelse:

1. Appliceres på ren og tør hud
2. Klip den ønskede længde
3. Fjern beskyttelsesfolie og applicér filmen ustrakt
4. Tryk filmen fast til huden for at sikre god tilhæftning
5. Fjern de 2 grønne appliceringssider ved at trække siderne væk fra filmen
6. Ret evt. folder og glat forsigtigt filmen, så den sidder godt på huden
7. Kan sidde i op til 7 dage, afhængig af hudens tilstand og klinisk vurdering



## Spycra Film

Steril tynd transparent film med silikoneklæb

### Atraumatisk

Den bløde silikoneklæber sikrer god tilhæftning og skånsom fiksering. Kan fjernes atraumatisk og smertefrit, og er især velegnet til skrøbelig og udsat hud.

### Høj bærekraft

Meget blød og fleksibel - former sig efter konturerne og følger kroppens bevægelser. Åndbar, væske- og bakterietæt film - minimerer risiko for maceration af huden og beskytter mod forurening.

### Enkel i brug

Patenteret - hurtig og enkel applicering. Kan foldes ud, hvis den krøller før applicering. Kan re-appliceres ved evt. folder i filmen efter applicering. Efterlader ikke silikonerester på huden.

### Indikationer:

Anvendes som primær eller sekundær bandage

- Over overfladiske sår
- Fiksering af primær sårbandage
- Fiksering af slanger, dræn og katetre
- Landingzone under kraftigt klæbende produkter
- Beskyttelse af skrøbelig og udsat hud, ex. mod friktion

### Anvendelse:

1. Appliceres på ren og tør hud
2. Træk det hvide beskyttelsesfolie af indtil den grønne kant og applicér filmen ustrakt
3. Tryk filmen fast til huden for at sikre god tilhæftning
4. Fjern de 2 grønne appliceringssider ved at trække siderne væk fra filmen
5. Ret evt. folder og glat forsigtigt filmen, så den sidder godt på huden
6. Kan sidde i op til 7 dage, afhængig af hudens/sårets tilstand og klinisk vurdering





## Spycra Roll, usteril film med silikoneklæb på rulle

Vare nr.	Produktbeskrivelse	Størrelse	Antal/æske	Æsker/karton
SR-55	Spycra Roll, usteril	5 cm x 5 m	1 rulle	5 æsker
SR-105	Spycra Roll, usteril	10 cm x 5 m	1 rulle	5 æsker
SR-155	Spycra Roll, usteril	15 cm x 5 m	1 rulle	5 æsker

Usteril – bør kun anvendes på intakt hud.  
Holdbar 5 år efter produktionsdato.

## Spycra Film, steril film med silikoneklæb

Vare nr.	Produktbeskrivelse	Størrelse	Antal/æske	Æsker/karton
SF-680	Spycra Film, steril	6 x 8 cm	10 stk	5 æsker
SF-1012	Spycra Film, steril	10 x 12 cm	10 stk	5 æsker
SF-1020	Spycra Film, steril	10 x 20 cm	10 stk	5 æsker
SF-1520	Spycra Film, steril	15 x 20 cm	10 stk	5 æsker

Holdbar 3 år efter produktionsdato.

### Advarsel:

Må ikke anvendes som primær fiksering af IV-kanyler, IV-porte eller anden infusionsudstyr over indstiksstedet. Læs i øvrigt instruktionen i æsken før brug.



Producent:  
Reskin Medical N.V.  
+32 (0)13 35 36 24  
info@reskin.eu



Lyngsø Alle 3 | DK-2970 Hørsholm  
Tlf.: 32 97 15 25 | info@apodan.dk | www.apodan.dk