

Lympha Press Optimal Plus med styrning från Applikation i mobilen

Lympha Press Optimal Plus

Lympha Press Optimal Plus är en kraftfull, effektiv och pålitlig flerkammarkompressionspump. Den har unika funktioner som styrs från mobilen i en mycket lättanvänd Applikation.

På pumpens display, eller med hjälp av en applikation, kan programmen anpassas individuellt efter varje användares behov. Pumpen kan användas med alla Lympha Press multikammarmanschetter.

- Justerbart tryck efter individuella behov
- Möjlighet till olika kombinationer av kompressionsprogram
- Möjlighet att stäng av enskilda luftkammare



Programmer:

- Pretherapy
- Sequential
- Wave
- Post-therapy

Varunr.	Vikt (kg)	Storlek (cm)	Tryck mmHg
022104	4,5	19,8 x 34 x 24	20-90

Indikationer:

- Primärt lymfödem
- Sekundärt lymfödem
- Ödem efter mastektomi
- Lipödem
- Kronisk venös insufficiens
- Kroniskt ödem
- Venösa bensår
- Traumatiskt ödem

Lympha Press Optimal Plus är avsedd att användas på sjukhus och vårdinrättningar samt för hemmabruk

Kontrindikationer:

- Konstaterad eller misstänkt djup ventrombos (DVT) eller lungemboli
- Tromboflebit
- Aktiv hud- eller extremitetsinfektion/ inflammatorisk sjukdom (akut cellulit, annan okontrollerad hud- eller obehandlad inflammatorisk hudsjukdom)
- Icke kompenserat hjärtfel (akut lungödem, icke kompenserat hjärtfel)
- Svår arterioskleros eller annan ischemisk kärlsjukdom
- Alla omständigheter som gör att ett ökat återflöde av venöst blod och lymfvätska inte är önskvärt

Försiktighet:

Försiktighet bör iaktas vid användning på personer med hjärtsjukdomar. Rådgör med personens ansvarige läkare. Högt tryck rekommenderas inte för personer med perifer ocklusiv artärsjukdom. Buken bör inte behandlas under graviditet.


Om Lympha Press Optimal Plus

Graderat tryck

Att trycket är graderat betyder att den luftkammare som är längst bort från hjärtat (vid fingrar/tår) får det högsta trycket och att trycket avtar i varje efterföljande kammare med minimum 1 mmHg.

Det graderade trycket hjälper kraftfullt och samtidigt skonsamt lymfsystemet att ta hand om svullnadsvätskan (ödemet). Trycket kan individualiseras i varje kammare med hjälp av en enkel programvara som medföljer.

Exempel på det graderade trycket där skillnaden mellan varje överlappende kammare är 1 mmHg.

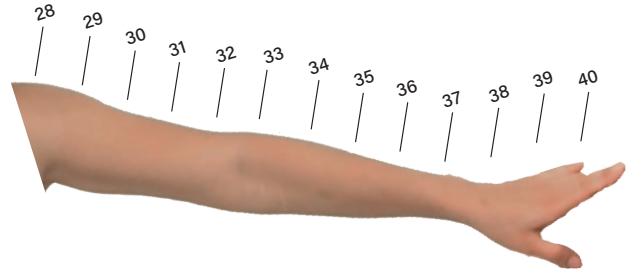

Pretherapy:

Pretherapy-programmet är ett unikt förberedande intensivprogram för kroppens centrala område. Det förbereder lymfsystemet i området närmast bålen, så att mottagandet av ödemvätskan från perifera delar av kroppen lättare kan passera.

Pretherapy-programmet förbereder lymfsystemet inför något av de två lymfdränageprogrammen som Lympha Press Optimal V2 erbjuder. Vid skador i lymfsystemet är det extra viktigt att börja med detta program. Trycket över bålen är förinställt till 40 mmHg och programmets varaktighet är 10-15 minuter.

Sequential:

Sequentialprogrammet är ett huvudprogram som ger ett intensivt och effektivt pulserande kompressionstryck, där varje luftkammare fylls med ett graderat lufttryck. Luftkamrarna fylls i sekvenser och förblir fyllda med luft till dess luftkamrarna samtidigt töms på luft.

Lympha Gradient håller trycket längst i de perifera områdena, varför det lämpar sig väl till personer som behöver en mer intensiv behandling. Programmet har en uppmjukande effekt på fibrotiska områden.

Wave:

Wave-programmet, till skillnad från Sequential håller inte kvar trycket under varje kompressionscykel. Det komprimerar tre kamrar i taget och flyttar sig sakta uppåt - som en våg. Lämpar sig speciellt bra till personer som inte klarar långvarigt tryck, t.ex. personer med generaliserad smärta.

Post-therapy:

Posttherapy är ett avslutande program. Programmet ger en koncentrerad komprimering i ett valt område antingen centralt, medialt eller perifert. Programmet avslutas med två Wavecykler.