

Transafix®

ENKEL I BRUG • SIKKER FIKSERING • HØJ BÆREKOMFORT



Transafix Fikseringstape til fiksering af sonder, katetre og dræn


- Én løsning til alle slangestørrelser

- **Minimerer risiko for stripping af huden** - Kan sidde i op til 7 dage
- **Høj bærekraft** - Åndbar, blød og formbar Transpore® tape
- **Reducerer risiko for utilsigtet træk og seponering** - Klæbende flade til fiksering af slangen
- **Sikker i brug** - Optimal fiksering med både klæb og velcro
- **Justerbar fiksering** - Velcro kan åbnes/lukkes mange gange og slangen genplaceres

Hvordan anvendes Transafix Fikseringstape?

- 1-2 Rens og tør huden omhyggeligt
- 3 Fjern beskyttelsesbagsiden
- 4 Placer fikseringstapen på huden
- 5 Fjern beskyttelsepapiret
- 6 Fastgør slangen på den klæbende flade og luk velcro'en

Kan anvendes af både børn og voksne

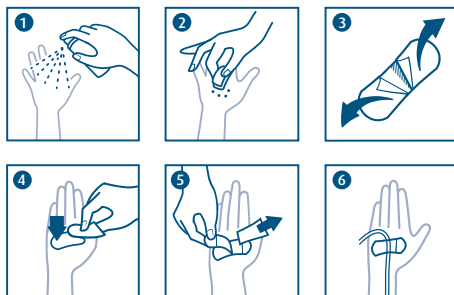

NYHED!
Fås nu også i en smart månedspakning med 5 stk.



Apodan Varenr.	Beskrivelse	Passer til CH størrelse	Antal/æske
8700150	Transafix 1, 1,5 x 7,5 cm, usteril	2-10	100 stk.
8700250	Transafix 2, 3 x 9 cm, usteril	8-18	50 stk.
8700350	Transafix 3, 4,5 x 15 cm, usteril	12-24	25 stk.
8500250APO	Transafix 2, 3 x 9 cm, usteril	8-18	5 stk.
8500350APO	Transafix 3, 4,5 x 15 cm, usteril	12-24	5 stk.