





# BIOSYNEX SELVTEST COVID-19 Ag-antigen INFEKTION



Test til selvdiagnosticering  
af SARS-CoV-2 antigen.



-  **Påviser virus antigen**  
Nucleocapsid protein (N proteins)
-  **Simpel**  
Næsepodning
-  **Hurtig**  
Resultat på 15 minutter
-  **Præcision**  
Sensitivitet: 97,2 % ; Specificitet: 100 %


# BIOSYNEX COVID-19 Ag BSS SELV-TEST

## INSTRUKTION

Læs brugsanvisningen for komplet procedure.



1 Fjern forsigtigt sølvpapirlåget fra rørets top, mens det holdes lodret og sæt det ned i den orange cirkel på æsken.

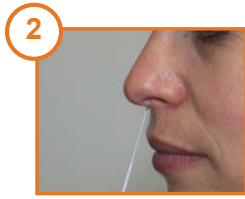

2 Før pødepindens bløde ende lodret ind i næseboret, til der mødes modstand (ca. 2-3 cm). Derefter drejes pinden langsomt rundt 5 gange mod indersiderne i næsens væg i 5-10 sekunder. Pødepinden tages ud af det ene næsebor, hvorefter samme procedure gentages i det andet næsebor.



3 Anbring pødepinden med vadt delen nederst i røret. Derefter drejes den rundt i væsken 6 gange, mens den presses mod rørets bund.



4 Pødepinden skal derefter stå i røret i 1 minut



5 Derefter klemmer man med to fingre om plastrøret og trækker pødepinden op igennem det klemte parti for at få mest mulig væske ud af pindens vattel.



6 Smid pødepinden væk og sæt den lille plastdyse fast på enden af røret.




7 Vend bunden i vejret på plastrøret med dysen og dryp 4 dråber af blandingen ned i testens felt markeret med et "S".




8 Efter 15 minutter kan testen aflæses

## AFLÆSNING


### NEGATIV

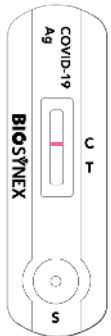

### POSITIV

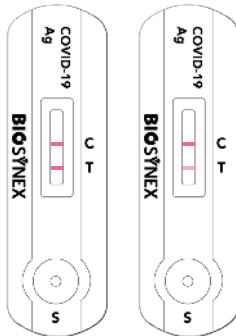

### UGYLDIG

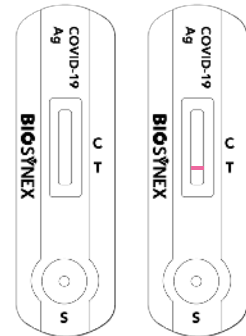

## VARENDR.:

1 stk.: 859258

5 stk.: 859263



## INDHOLD I ÆSKEN

### 1 eller 5 poser med:

- 1 testkasette
- 1 pødepind
- 1 præfyldt rør med væske
- 1 plastdyse/pipettespids
- 1 rød prop
- 1 brugsanvisning



# BIOSYNEX

Biosynex designs, manufactures and distributes Rapid Diagnostic Tests (RDTs) in France and internationally. The RDTs, in their professional version, allow a better medical management of the patients thanks to the speed of their result and their ease of use. In their self-test version, they allow the general public self-monitor of various pathologies thus ensuring better prevention and accelerating the demand for care.

Carefully read the instructions in the leaflet for the various products.

Legal manufacturer of references 855164, 855169, 858931, 855147, 858851, 855146, 855163, 942692, 858865, 858836, 858963, 100 25, 1040010 : Biosynex SA Legal manufacturer of references 859256, 859257, 859258, 859261, 859262, 859263, SW40002, SW40005A, SW40006, SW40010, 859081, 859082 : Biosynex Swiss SA REF 855164 : Listed in Annex II - list A of Directive 98/79/EC.

Date of last revision: 07/2021

 Apodan