


# Curea P2 Active®

## Superabsorberende kulbandage med atraumatisk sårkontaktlag



curea medical

Innovation in Care

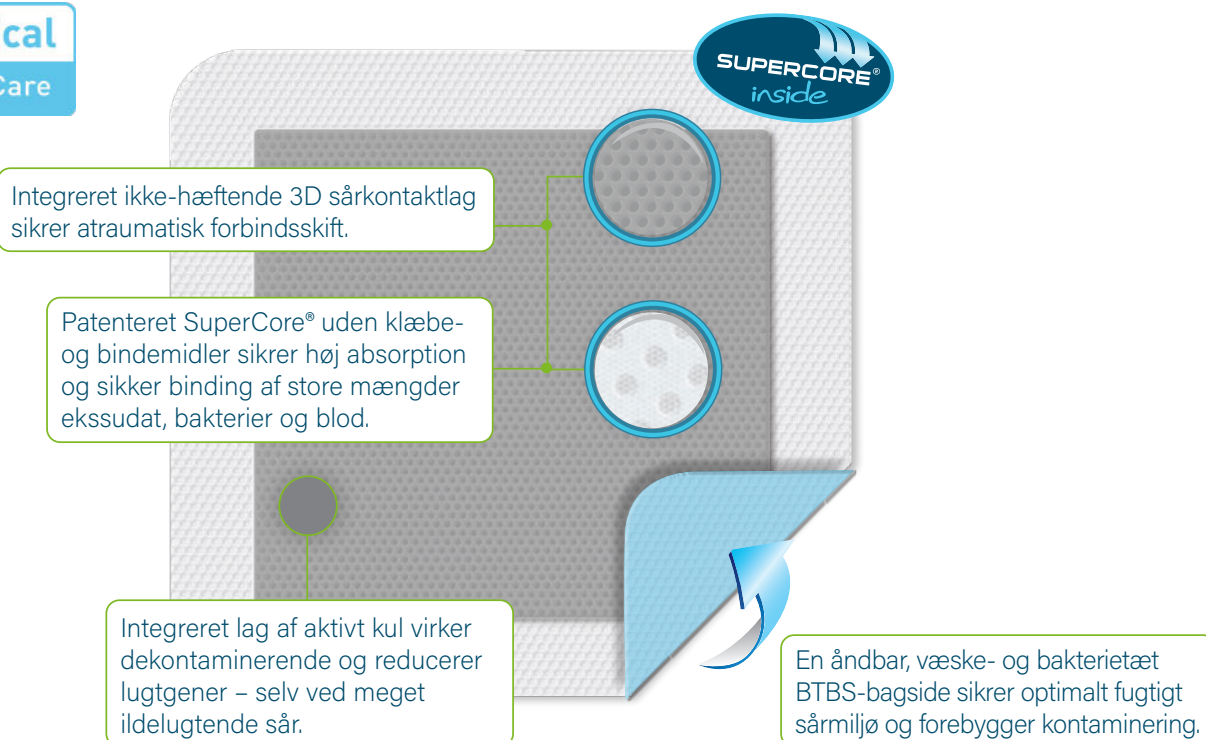

### Curea P2 Active - funktion & fordele:


- Unikt 3D sårkontaktlag sikrer atraumatisk forbindsskift – beskytter sårbund og nyt granulationsvæv – minimerer smerter ved forbindsskift.
- Aktivt kullag sikrer endnu kraftigere reduktion af lugt – fremmer livskvalitet.
- Patenteret SuperCore® kerne sikrer hensigtsmæssig absorptionskapacitet og sikker binding af store mængder ekssudat – forlænger skifteinterval.
- Dokumenteret binding af alle typer ekssudat, herunder høj viscositet og blod – ét produkt til mange formål.
- Holder såret fugtigt – fremmer sårhelingen.
- Vertikal absorption og optimal væskefordeling – reduceret risiko for maceration af sår og hudomgivelser.
- Dokumenteret binding og reduktion af bakterier og lugt - reducerer risiko for infektion.
- Bevarer form under brug – høj bærekraft.
- Åndbar væske- og bakterietæt bagside beskytter mod lækage og kontaminering af omgivelser – reducerer unødige bandageskift.

## Curea P2 Active - indikationer og anvendelse:


- Akutte og kroniske sår med let til kraftig sekretion.
- Inficerede og ildelugtende sår.
- Særdeles velegnet til sår med granulerende sårbund og skrøbelige hudomgivelser, samt ved sår, hvor der er smerter i forbindelse med forbindsskift.
- Ideel under kompression.
  
- Appliceres direkte over såret, min. 2-3 cm ud over sårkanter.
- Siden med tekst skal vende væk fra såret.
- Kan kombineres med kavitationsbandager ved dybere sår.
- Fikseres med passende fiksering (tubular, cirkulær bandage etc.).
- Ved klæbende fiksering, da kun i kanten.
- Kan ligge på såret i op til 7 dage.

## Bemærk!

- Der må ikke klippes i bandagen.
- Må ikke anvendes til tørre sår eller ved sår med blottede muskler, sener og knogler.

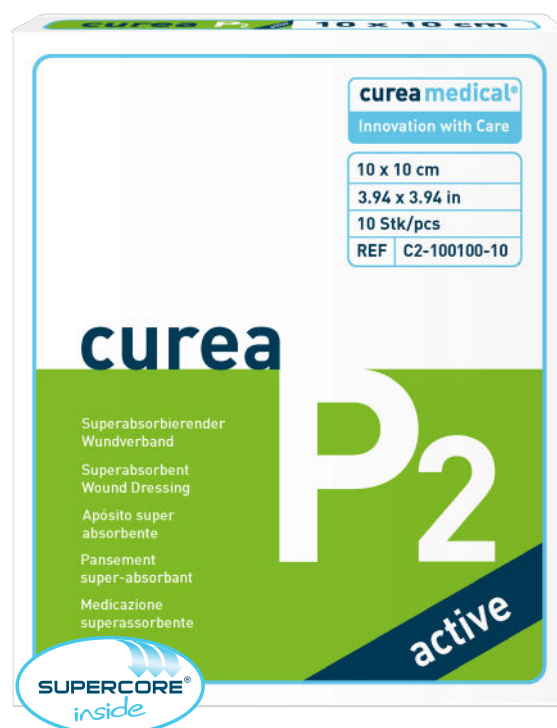

Mikrobiel og endotoksisk dekontaminering.

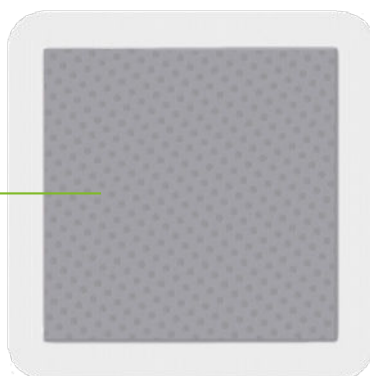

Varenr.	Beskrivelse	Størrelse	Størrelse på sugende midte	Antal pr. æske
C2-100100-10	Curea P2 Active	10 x 10 cm	9 x 9 cm	10
C2-100200-10	Curea P2 Active	10 x 20 cm	8 x 18 cm	10
C2-200200-10	Curea P2 Active	20 x 20 cm	18 x 18 cm	10

Steril og enkeltpakket

Holdbar 5 år efter produktionsdato

For yderligere information kontakt:

Tlf.: 32 97 15 25 | [www.apodan.dk](http://www.apodan.dk) | [info@apodan.dk](mailto:info@apodan.dk)