

Størrelsesguide

SMALL

Omkreds: 4,7 - 5,7 cm

#1

MEDIUM

Omkreds: 5,7 - 6,7 cm

#2

LARGE

Omkreds: 6,7 - 7,7 cm

#3

X-LARGE

Omkreds: 7,7 - 8,8 cm

#4

XX-LARGE

Omkreds: 8,8 - 9,8 cm

#5

Bandagen skal have tæt kontakt med hud/sår på finger/tå og samtidig være komfortabel at bære.



Vare nr.	Varebeskrivelse	Antal/æske
4401	PolyMem finger/tå #1, S	6 stk
4402	PolyMem finger/tå #2, M	6 stk
4403	PolyMem finger/tå #3, L	6 stk
4404	PolyMem finger/tå #4, XL	6 stk
4405	PolyMem finger/tå #5, XXL	6 stk

Anvendes efter anvisning af sundhedspersonale.
Sterile og enkeltpakkede. CE-mærket klasse 2b
Holdbar 5 år efter produktionsdato

Forhandles her:



webapoteket.dk

med24.dk

APOTEKEREN.dk

apopro
Danmarks online apotek

Derudover forhandles PolyMem finger/tå bandagen på flere af landets apoteker. Spørg på dit lokale apotek.

Apodan anvender FSC®, ECF og European Ecolabel godkendt papir.



PolyMem finger/tå bandage

ALT-I-ÉN BANDAGE TIL OPTIMAL BEHANDLING AF SÅR/SKADER



Tlf.: 32 97 15 25 | info@apodan.dk | www.apodan.dk

0423

Hurtig heling - Lindrer smerter

PolyMem®

PolyMem er en aktiv bandage, som fremmer heling, forebygger infektion og lindrer smerter. Bandagen renser såret, løsner og fjerner urenheder og bakterier, og reducerer hævelse i og omkring sår/skade.



Unikke komponenter med unik effekt

Renser: Surfaktant er et mildt overfladeaktivt stof, som sikrer kontinuerlig rensning af området.


Blødgør og beskytter: Glycerin er hudplejende, medvirker til optimalt fugtigt sårmiljø og sikrer, at bandagen ikke hæfter til sår/skade ved fjernelse.

Absorberer: Polyuretan matrix udvider sig og formes efter vævet. Sammen med indholdet af superabsorbant sikres høj væskehåndtering, binding af væske og bakterier i bandagen og reduceret risiko for lækage.

Beskytter: Den åndbare filmbagside beskytter mod forurening udefra og kan bruges som indikator for optimal tidspunkt for skift af bandagen.

Lindrer smerter: Den unikke konstruktion af bandagen sikrer, at aktiviteten i de nerveender, der registrerer smerter, ændres og smerteoplevelsen reduceres.

PolyMem skal ALTID have kontakt til sår/sårbund. Anvend ikke andre produkter under PolyMem.

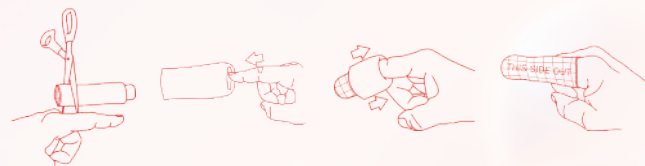

Enkelt - Effektivt - Sikker i brug

Indikationer

- Akutte sår, hudafskrabninger, rifter, snitsår.
- Traumatiske sår, pulpaskader, forbrændinger.
- Vanskeligt helende sår samt diabetiske fodsår.
- Skader uden sår, kontusioner, forstuvninger etc.
- Efter operation af finger/tæer.

Anvendelse

For valg af rette størrelse anvendes størrelsesguiden, alternativt måles omkredsen af finger/tå på det bredeste sted.

1. Mål bandage på finger/tå for rette længde. Klip evt. overskydende af i den åbne ende.
2. Rens såret efter gældende retningslinier.
3. Træk let i sliden, således bandagens lukkede ende trækkes tættere på den åbne ende.
4. Fjern sliden - eller brug den til skånsom indføring af finger-/tåspids ved at placere finger/tå på sliden, og træk forsigtigt sliden ud samtidig med, at bandagen rulles op over finger/tå.
5. Træk bandagen helt på plads, den skal optimalt have tæt kontakt til finger/tå.
6. Kanten fikseres med film, tape eller cohesive fikseringsbind.
7. Bør af hensyn til væskehåndtering og observation ikke dækkes af anden bandage.
8. Skift bandagen før sårsekret når sårkanten – 1. gang efter max. 3 dage.

Ved åbne sår anbefales det at skifte bandagen første gang efter max. 3 dage.

Efterfølgende skift

1. Fjern bandagen, vurder sår, sekretion og skifteinterval.
2. Soignér hudomgivelser og påsæt ny bandage.
3. Forstyr ikke sårbunden, undlad soignering/debridering.

Ved infektion følges lokale retningslinier.

Skiftefrekvens

PolyMem må ligge på såret i max. 7 dage, dette afhænger af sekretion og sårets tilstand. Skift bandagen straks, hvis den bliver våd.



Bandagen renser sår og reducerer hævelse, hvorfor det er normalt, at såret væsker mere de første dage. Derfor må der her forventes, at bandagen skiftes hyppigere for at forebygge maceration af hudomgivelser.

Som indikator for skift anbefales det at optegne sårets omkreds på bandagens yderside. Skift bandagen før sårsekret når sårkant.

Tips & tricks

Ved moderat til kraftigt væskende sår anbefales at anvende et stykke PolyMem WIC under finger/tå-bandagen. Vælg da evt. en finger/tå-bandage én størrelse større.



Ved skrøbelig/skadet hudomgivelser kan PolyMem med fordel dække hele området. Riv forsigtigt svejsningen op i den overskydende del af bandagen, træk PolyMem på, så den dækker håndryg/håndflade eller fodryg/fodballe, fikser på kanter.

I starten af behandlingen kan der forekomme let lugt fra sår/bandage, dette skyldes oprensning og er helt normalt.

Hæfter bandagen til såret (pga. størknet blod/ekssudat), løsnes med vand/NaCl, hvorefter bandagen fjernes forsigtigt.