

Lympha Press Optimal Plus - med app styring

Lympha Press Optimal Plus

Lympha Press Optimal Plus er en robust, pålidelig og effektiv dynamisk multikammer kompressionspumpe med unikke funktioner. På pumpen eller ved hjælp af en letanvendelig app kan programmerne tilpasses den enkelte brugers behov og ønsker. Pumpen kan anvendes med samtlige multikammermanchetter.

- Justerbart tryk efter individuelle behov
- Mulighed for forskellige kombinationer af kompressionsprogrammer
- Mulighed for aflukning af luftkamre

Programmer:

- Pretherapy
- Sequential
- Wave
- Post-therapy



Varenr.	HMI Nr.	Vægt (kg)	Størrelse (cm)	Tryk mmHg
022104	130295	4,5	19,8 x 34 x 24	20-90

Indikationer:

- Primært lymfødem
- Sekundært lymfødem - Fx. efter mastektomi
- Lipødem
- Kronisk venøs insufficiens
- Kronisk ødem
- Venøse sår
- Ødem efter traume

Lympha Press Optimal Plus er beregnet til hospitals-, hjemme- og klinikbrug.

Kontraindikationer:

- Kendt eller mistænkt dyb venetrombose (DVT) eller tromboflebit
- Under en inflammatorisk flebitisk proces
- Akut infektion i den berørte ekstremitet
- Dekompenseret hjertesvigt
- Alvorlig arteriosklerose eller andre iskæmiske vaskulære sygdomme
- Enhver omstændighed, hvor øget venøs og lymfatisk tilbageløb er uønsket

Lympha Press Optimal Plus - Programmer

Forsigtighed:

Pga. bevægelse af væsker i kroppen under brug af systemet skal der udvises forsigtighed ved anvendelse på personer med hjertesygdom. Et højt tryk anbefales ikke for personer, som har perifer okklusiv sygdom. Maveregionen bør ikke komprimeres under graviditet.

Pretherapy:

Præterapi er et unikt indledende program, som intensivt bearbejder kroppens centrale områder. Formålet med Præterapi er, at lymfesystemet først skal tage hånd om den ekstracellulære væske beliggende i de centrale dele af kroppen, inden de perifere områder komprimeres.

Programmet er baseret på principperne i den manuelle lymfedrænage, som begynder centralt. Præterapi er særligt vigtigt, når lymfesystemet er dysfunktionelt.

Sequential:

Sequential er et hovedprogram som fylder manchetternes luftkamre i perifer til central retning. Når alle luftkamre er fyldt med luft, lettes trykket og der er en kort pause, inden inflationen starter forfra igen.

Dette program holder trykket i længst tid i de perifere luftkamre. Derfor er det velegnet til personer, der behøver længere tids perifer kompression samt mere intensiv kompression i hele manchetten.

Wave:

Wave er et andet hovedprogram. Her fyldes manchettens luftkamre i perifer til central retning som en "bølge". Når "bølgen" har bevæget sig hele vejen til luftkammeret tættest på kroppens midte, lettes trykket og der er en kort pause inden inflationen starter forfra igen.

Når "bølgen" bevæger sig op ad legemsdelen, er der altid flere luftkamre fyldt samtidigt for at give kompression i tilstrækkeligt tid, for at lymfesystemet kan håndtere den ødematøse væske, og forhindre tilbageløb.

Dette program komprimerer et mindre område ad gangen, derfor er det velegnet til personer, som ikke har brug for lang tids perifer kompression eller personer med smerter.

Post-therapy:

Postterapi er et afsluttende program. Programmet giver fokuseret kompression i et valgt område enten centralt, medialt eller perifert.

Postterapi afsluttes med to Wave inflationer.

