

## Fejlfinding – Phlebo Press DVT model 760 D

### Vejledning til fejlfinding

Symptom	Mulig årsag	Afhjælpende foranstaltning
DVT kompressionspumpen virker ikke.	Ingen elektricitet	Efterse stikkontakten.
	Adapter til jævnstrøm	Kontroller, at jævnstrømsadapterledningen er tilsluttet kontakten til jævnstrømsadapteren på pumpen, og at jævnstrømsadapteren er sluttet til en passende 100-240 Volt stikkontakt.
	Ledning til jævnstrømsadapteren	Undersøg ledningen for fejl.
<b>Statusindikator</b> lyser orange	Funktionsfejl	Kontakt din lokale forhandler om service.
Pumpen begynder at arbejde, men standser omgående.	Luften kan ikke bevæges igennem slangebundet.	Undersøg slangebundterne for knæk, snoninger og folder.
En af manchetterne oppumpes, men den anden gør ikke.	Den anden manchet modtager ikke luft.	Undersøg dens slangebundet for knæk, snoninger og folder.
Pumpen holder op med at fungere, <b>statusindikatoren</b> lyser orange, og alarmeren lyder.	Slangebundet er ikke tilsluttet ordentligt til manchetten eller pumpen, eller blindproppen er ikke indsat i den ubenyttede luftudgang.	Undersøg og fastgør alle lufttilslutninger. Når kun et ben behandles, blokeres den ubenyttede luftudledning altid med den blindprop, som leveres med pumpen. Hvis alle lufttilslutninger er OK, og problemet varer ved, bedes du kontakte din lokale forhandler angående service.
Pumpen leverer et meget lavt tryk uanset det tryk, som brugeren har indstillet.	Defekt manchet.	Udskift manchetten, og kontroller igen.
	Et internt problem.	Kontakt din lokale forhandler angående service.
Mislyd	Overførsel af vibrationer til overfladen eller til patientens seng.	Sørg for, at pumpen står på alle fire støddæmpere eller er anbragt korrekt over sengehesten.
	Internt problem.	Kontakt din lokale forhandler angående service.

**Lavt batteriniveau: Alarm starter 20 min før batteri er afladet.**

Version 0520