


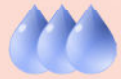

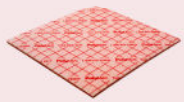
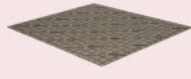










PolyMem produktvalg

Der bør laves en helhedsvurdering for at sikre et bandagevalg, der optimalt opfylder sårets og patientens behov

Eksudatniveau					
Ikke-inficeret	PolyMem				
		<small>Til de første dage med brug af PolyMem</small>		PolyMem Max	
				PolyMem Wic + PolyMem Max	
Kritisk koloniseret, inficeret eller med risiko for infektion	PolyMem Silver				
		<small>Til de første dage med brug af PolyMem</small>		PolyMem Max Silver	
				PolyMem Wic Silver + PolyMem Max Silver	
Anvendes sammen med ovennævnte bandager Kaviteter og underminering Fistler og ikke-synlig, sonderbar sårbund: Brug kun Rope	PolyMem Wic (ikke-inficeret)				
	PolyMem Wic Silver og PolyMem Wic Silver Rope (kritisk koloniseret, inficeret og med risiko for infektion)				

	<p>PolyMem Standard Let til moderat væskende sår. Lav MVTR sikrer et fugtigt sårmiljø.</p>		<p>PolyMem Silver bandager Alle PolyMem findes i en udgave med sølv. Samme opbygning og effekt som PolyMem, suppleret med indehold af små sølvpartikler med anti-mikrobiel effekt. Sølvets i PolyMem Silver bandagerne frigives ikke til sårbunden, men virker kun i bandagen. Derved beskyttes nye celler i sårbunden for sølvets toksiske virkning.</p>
	<p>PolyMem MAX Moderat til kraftigt væskende sår. Har en høj MVTR og håndterer væsentligt mere eksudat end PolyMem Standard. Kan nedsætte skiftetrekvensen. Anbefales initialt i sårbehandlingen.</p>		
	<p>PolyMem WIC Kavitetsbandage uden filmbagsiden. Anvendes til kaviteter over ½ cm, og hvor man kan se sårbunden. PolyMem MAX som sekundær bandage. Kan anvendes som sårkontaktlag.</p>		<p>PolyMem Silver bandagerne anvendes til:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sår, hvor der er risiko for infektion. - kritisk koloniserede sår. - behandling af infektiøse sår, hvor den underliggende årsag til infektionen er behandlet. - særdeles velegnet til sår med udtalte lugtgener.
	<p>PolyMem Finger/Tå bandage Alt-i-én bandage. Anvendes til sår og skader på fingre og tæer.</p>		<p>PolyMem Silver findes i alle udgaver, ligesom det øvrige sortiment af PolyMem.</p>
	<p>PolyMem Surgical Alt-i-én bandage med filmbagside. Anvendes ved kirurgiske incesioner.</p>		<p>PolyMem WIC Silver Rope Forstærket kavitetsbandage med sølv. Udviklet til anvendelse i fistler med sonderbar sårbund. Desuden anvendelse i kaviteter med sonderbar ikke-synlig sårbund. PolyMem MAX som sekundær bandage.</p>