

Quickguide til PolyMem finger/tå-bandage



Alt-i-én terapeutisk sårbehandlingsystem til sår & skader på fingre & tæer

Hvad er PolyMem Finger/tå bandage?

En **AKTIV** sårbandage bestående af:

- Polyuretan matrix
- Superabsorbant
- Surfaktant
- Glycerin
- Filmbagside

Er turbulær og lukket i den ene ende.

Hvad gør PolyMem?

- Renser kontinuerligt
- Løser debris/fibrin/nekrose
- Absorberer og binder sårsekret, debris og bakterier
- Sikrer optimal fugtigt sår miljø
- Sikrer atraumatisk fjernelse
- Lindrer smerter



Indikationer: Alle typer sår- og skader på fingre/tæer


- Akutte sår: hudafskrabninger, rifter, snitsår
- Traumatiske sår: pulpaskader, brandskader
- Kroniske sår, herunder diabetiske fodsår
- Skader uden sår: kontusioner, forstuvninger etc.
- Postoperativt til fingre/tæer

PolyMem

- modulerer inflammation
- understøtter og accelererer autolytisk debridering
- booster sårheling
- reducerer mikroødem i/omkring sår/skade
- hæmmer dannelsen af hæmatom
- reducerer infektion og infektionsrisiko
- reducerer lugtgener
- lindrer smerter vha. antinociceptorisk aktivitet

PolyMem **skal altid** have kontakt til sårbunden.
Anvend ikke andre produkter under PolyMem.

Størrelsesguide

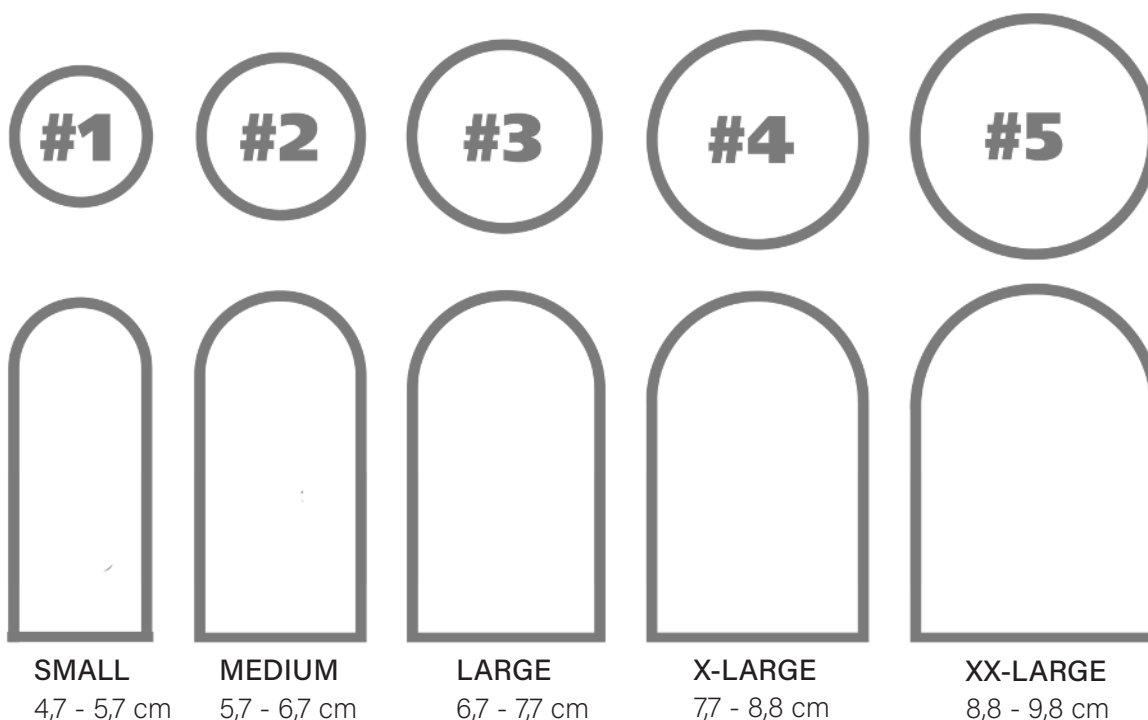


Anvendelse af PolyMem Finger/tå bandage

Første applicering:

For valg af rette størrelse måles omkredsen af finger/tå på det bredeste sted.

Alternativt anvendes illustration af fingerens størrelse på emballagen.

1. Mål bandagen på finger/tå for rette længde. Klip evt. overskydende af i den åbne ende.
2. Rens såret efter gældende hygiejniske principper.
3. Træk let i sliden, således bandagens lukkede ende trækkes tættere på den åbne ende.
4. Fjern sliden - eller brug den til skånsom indføring af finger-/tåspids ved at placere finger/tå på sliden, og træk forsigtigt sliden ud samtidig med, at bandagen rulles op over finger/tå.
5. Træk bandagen helt på plads, den skal sidde til uden at stramme.
6. Kanten fikseres med elastisk film, tape eller med cohesive fikseringsbind.
7. Bør af hensyn til væskehåndtering og observation ikke dækkes af anden bandage.
8. Skift bandagen før sårsekret når sårkanten - 1. gang efter max. 3 dage.

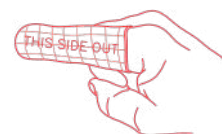

Efterfølgende skift:

1. Fjern bandagen og vurder sårets behov, sekretion og skifteinterval.
2. Forstyr ikke sårbunden, undlad soignering/debridering af såret.
3. Ved infektion soigner efter lokale hygiejniske principper.
4. Soigner hudomgivelser.
5. Applicér ny PolyMem finger/tå bandage.
6. Bør ikke dækkes af yderligere bandage.

Tips & tricks

- Ved skrøbelig/skadet hud kan PolyMem med fordel dække hele området. Riv forsigtigt svejsningen op i den overskydende del af bandagen, og træk PolyMem op på håndryg/håndflade eller fodryg/fodballe. Kantfikseres.
- Ved moderat til kraftigt væskende sår/skader, anbefales at anvende et stykke PolyMem WIC (ref. 5731) under finger/tå bandagen. Vælg da evt. finger/tå bandagen én størrelse større.
- PolyMem Finger/tå Silver anvendes, hvor der ønskes antimikrobiel effekt, fx. ved risiko for infektion eller ved infektion, hvor den underliggende årsag er behandlet.



Værd at vide

- PolyMem aktiveres af fugt hvorved surfaktant og glycerin frigives kontinuerligt. Er aktiv i op til 7 dage.
- Hæfter bandagen til såret (pga. størknet blod/ekssudat), løsnes forsigtigt med vand.
- PolyMem renser såret, hvilket i starten kan forårsage lugt/øget lugt, dette aftager.
- PolyMem løsner nekroser og fibrin, hvorfor såret initialt kan synes større og dybere, dette er normalt.



Skiftefrekvens

PolyMem kan ligge på såret i op til 7 dage - såfremt sekretion og sårets tilstand tillader det. Det anbefales ved åbne/væskende sår at skifte bandagen 1. gang på 3. dagen.

Som indikator for skift anbefales det at optegne sårets omkreds på bandagens yderside.

Bandagen skiftes, før eksudat når sårkanter eller er blevet våd.

For yderligere information kontakt:
Tlf.: 32 97 15 25 | www.apodan.dk | info@apodan.dk