

Brugervejledning

- Transafix® Trachealtubesæt

Fikseringssystem til endotrachealtuber

Transafix Fikseringssystemer - skånsom og komfortabel for patienten - enkel, sikker og fleksibel i brug

Transpore® er grundbestanddelen af denne serie Transafix med genlukkelig velcro. Fikseringstapen er en skånsom, effektiv og fleksibel løsning til fiksering af alle typer slanger, hvor der ønskes en sikker og justerbar langtidfiksering.



1. Rens omhyggeligt huden for fedt og creme
2. Fjern beskyttelsespapiret på bagsiden af plasteret (påtrykt "Transafix")
3. Sæt kindplasterne på huden og fikser ved at presse let
4. Fjern beskyttelsespapiret fra tubebåndet
5. Fastgør den klæbende del af båndet rundt om tuben
6. Fiksér båndet på velcro'en på begge kindplastre

Det er muligt at justere/genplacere båndet flere gange!

1. Løsn båndet fra kindplasteret
2. Juster/genplacér tuben
3. Sæt båndet fast på kindplasteret igen

- Fikseringstapene består af Transpore®, en mikroperforeret og åndbar PE tape med en meget hudvenlig klæber.
- På oversiden er der velcro, hvor tubebåndet fikseres. Tubebåndet har klæbende flade i midten.
- Placeres på tør og ren hud og kan sidde i op til 7 dage. Tåler slid, træk og vask uden at miste funktionen.

Vare nr.	Beskrivelse	Antal pr. æske	Antal pr. karton
8700600	Trachealtubesæt, usteril	50 sæt	12
8700700	Kindplaster, parvis, usteril	50 par	12
8700800	Tubeband, usteril	50 stk.	12